

## CONJUNTO DE PISTOLAS PRESURIZADAS PARA LIMPIEZA



CP203  
agua y detergente



CP206  
agua y aire

### LIMPIEZA, ENJUAGUE Y SECADO

- Reduce la carga microbiana en los artículos
- Reduce el costo en el proceso de limpieza
- Ayuda en la remoción de los residuos y fragmentos que se adhieren a los lúmenes

# CP200

REGISTRO ANVISA: CLASE I 80316870005

El CP200 es un equipo multifuncional desarrollado para realizar limpieza, enjuague y secado de artículos odonto-médico-hospitalarios, en especial los canulados y endoscopios flexibles. El CP200 es indicado para limpieza de instrumentales quirúrgicos como lúmenes estrechos y largos, acoplamientos y encajes, ranuras, fresas, tornillos, cremalleras, artículos de asistencia ventilatoria, además de los endoscopios.

## •CARACTERISTICAS•

Pistolas con boquillas cónicas de silicona que encajan en lúmenes de Ø3mm a Ø23mm, que permiten la conexión perfecta de las pistolas a los canulados

Posee sistema de sensoriamiento inteligente, que identifica la pistola en uso e inactiva las demás

Accionamiento de las pistolas por pedal, lo que evita la ocurrencia de DORT (Disturbio Osteomuscular Relacionado al Trabajo) en el profesional

Mangueras espiraladas que se estiran en hasta 3,5 metros

Producidos en material compatible, anticorrosivo y altamente resistente a las sustancias utilizadas en la limpieza

Pistolas señalizadas y diferenciadas por colores

Moderno sensor indica al operador sobre la necesidad de reposición de material (alcohol o detergente).

## REQUISITOS DE INSTALACIÓN



## RECOMENDACIONES

- La calidad del agua necesita ser por lo menos potable, en el caso de que no sea, es necesario la instalación de un filtro de 5 micra
- En el caso de que no tenga red de aire comprimido, es necesario la adquisición de un compresor de aire
- Si el agua no tiene la presión indicada, recomendamos la instalación de bomba para presurización

## DISTRIBUIDO POR

## •VENTAJAS•

Aumenta la eficacia del proceso de desinfección y esterilización

Fácil de limpiar

Atiende a la RDC N° 06, de 01 de marzo de 2013, ART. 28 - Para el secado de los equipos con canales, los servicios deben disponer de aire comprimido medicinal, gas inerte o aire filtrado, seco y exento de aceite

Atiende a la RDC N° 15, de 15 de marzo de 2012, ART. 69 - El CME clase II y la empresa procesadora deben utilizar pistola de agua bajo presión para limpieza manual de productos con lumen y aire comprimido medicinal, gas inerte o aire filtrado, seco y exento de aceite para secado de los productos.

### Dimensiones y Peso

### Conjuntos con 2 ou 3 Pistolas

|             |      |        |
|-------------|------|--------|
| Altura      | 23cm | 23,1cm |
| Ancho       | 38cm | 14cm   |
| Profundidad | 22cm | 18,5cm |
| Peso        | 6kg  | 3kg    |

### Requisitos Hidráulicos

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Presión de Agua: 2 a 3,5 Kgf / cm <sup>2</sup>                   |
| Calidad del agua: Potable                                        |
| Conexión de entrada: 3/4 y registro                              |
| Punto de Aire: 1/4 "con presión de 1,5 a 3 Kgf / cm <sup>2</sup> |

### Requisitos Eléctricos

### Conjuntos con 2 ou 3 Pistolas

|            |            |
|------------|------------|
| Tensión    | 110/220Vac |
| Frecuencia | 50/60Hz    |
| Potencia   | 100W       |
| Enchufe    | 2P+T       |

## NOVEDADES

Dilución automática del detergente enzimático en las proporciones de 0,2% a 1,5%

Succión directo del galón

Panel digital con interfaz interactiva y amigable

Nuevo diseño más moderno

Hecho de material de baja porosidad, más liviano y resistente

Bivolt

## PRODUCTOS RECOMENDADOS



ANIOSYME 5



(16) 3707 1200

[www.endoclear.com.br](http://www.endoclear.com.br)  
[sac@endoclear.com.br](mailto:sac@endoclear.com.br)

ENDOCLEAR

SOLUCIONES EN ENDOSCOPIA