


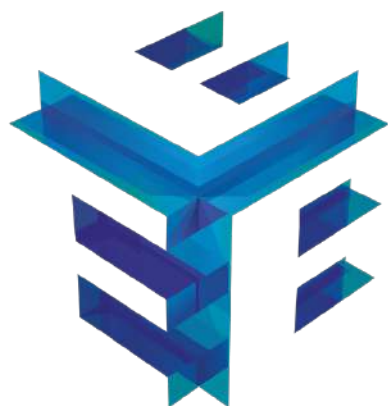

***Especialistas en
Esterilización y
Envase***

A MEMBER OF THE  **STERIMED** GROUP

www.grupoeee.com

ISO
9001

ISO
13485

ISO
11607-1

Especialistas en Esterilización y Envase

EEE que ahora forma parte del Grupo Sterimed, se fundó en 1983 basándose en la experiencia en la industria sanitaria iniciada desde 1970. EEE fabrica productos de alta calidad, con características innovadoras y contribuye a la educación e investigación en esterilización.



La sede del grupo y la planta principal se encuentran en Tlalnepantla, Estado de México. Y una planta adicional para la fabricación de prendas desechables en Jalisco.

Las sucursales de ventas se encuentran en:



México:
Guadalajara
Monterrey
Puebla



Extranjero:
Costa Rica
Colombia
Panamá
Argentina

EEE es un equipo de más de 400 colaboradores apasionados que actúan diariamente dentro de la filosofía de conformidad con todas las normas internacionales de calidad, con el compromiso de proporcionar productos y servicios de excelencia, buscando mejorar cada día.


Misión

Satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes y partes interesadas pertinentes fabricando, distribuyendo e innovando productos y servicios para ofrecer soluciones integrales para el sector salud e industria médica y alimentaria, siempre cumpliendo con los estándares de calidad y los requisitos aplicables a través de la calidad, servicio, atención y desempeño profesional de nuestro personal.

Visión

Llegar a ser la empresa líder en el sector salud e industria médica y alimentaria con la que todos los clientes y partes interesadas pertinentes se sientan confiados para satisfacer sus necesidades.

Somos parte de un gran grupo

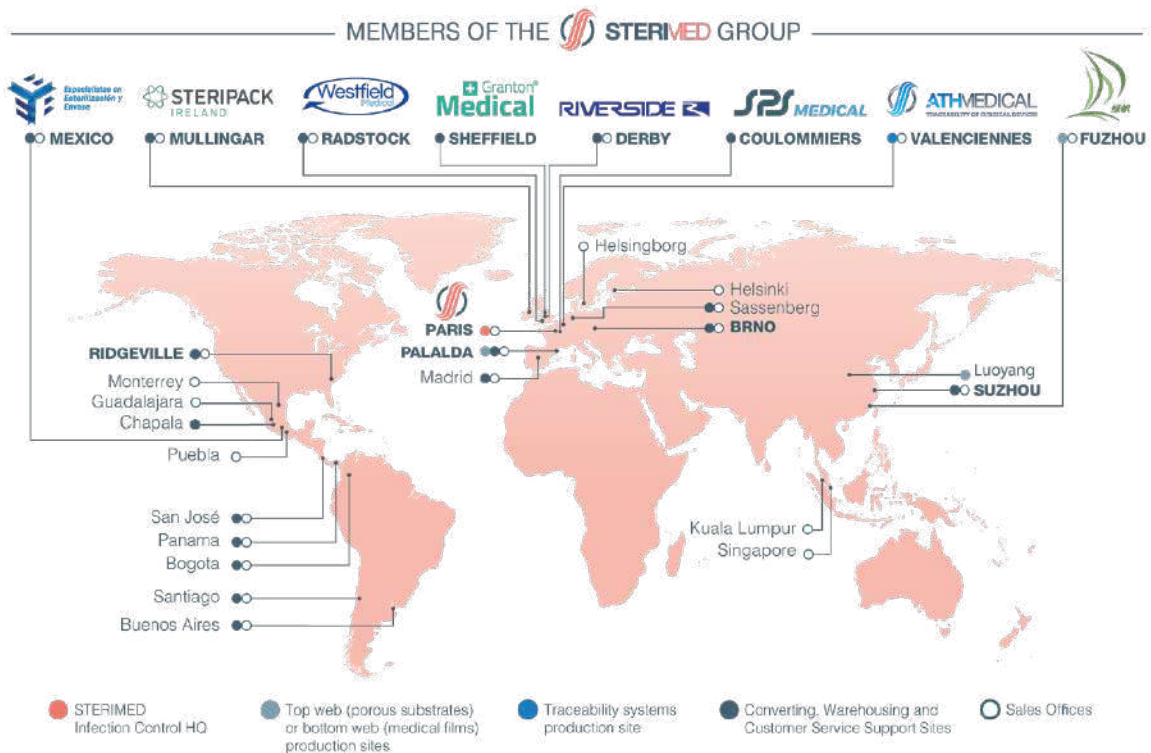

Certificaciones



ISO 9001:2015



11607-1:2019



ISO 13485:2016



CBPM (Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura)
NOM-241-SSA-2021

Índice

5	Bolsa de papel grado médico PMG®	47	Paquete de cirugía menor pediátrico estéril DHIGIENEEE®
8	Bolsas mixtas de papel grado médico PMG®	48	Equipo quirúrgico desechable universal estéril DHIGIENEEE®
10	Rollos mixtos de papel grado médico PMG®	49	Paquete básico para cirugía estéril DHIGIENEEE®
12	Envases mixtos con autosellado de papel grado médico PMG®	50	Paquete para cesárea y cirugía general estéril DHIGIENEEE®
14	Rollos mixtos de Tyvek® EEE®	51	Paquete para parto estéril DHIGIENEEE®
16	Rollos Ultra	52	Paquete para cirugía general universal estéril DHIGIENEEE®
18	Máquina Selladora 1500mi EEE®	53	Paquete de cama DHIGIENEEE®
19	Máquina Selladora 1500A EEE®	54	Paquete para mesa de quirófano DHIGIENEEE®
20	Prueba de verificación de sellado COLOR TEST®	55	Campos estériles DHIGIENEEE®
21	Papel crepado grado médico 1ra generación PMG®	55	Sábanas y fundas DHIGIENEEE®
22	Papel crepado grado médico 3ra generación PMG®	56	Paquetes para mortaja DHIGIENEEE®
23	Papel crepado grado médico precortado PMG®	57	Mascarilla quirúrgica DHIGIENEEE®
25	Campos SMS DHIGIENEEE®	58	Guantes de látex y nitrilo
26	Desbobinador EEE®	59	Tapete antimicrobiano TACK MAT®
27	Prueba Bowie and Dick COLOR TEST®	61	Humipak - Bolsa de retención de humedad
27	Cintas testigo de Gas y Vapor ESTERITECH®		Alianza Comercial EEE - ANIOS
27	Puntos de formaldehído COLOR TEST®	63	Productos complementarios para lavado de instrumental
28	Controles químicos COLOR TEST®	81	Productos para limpieza y desinfección de superficies
29	Incubura dual IC10/20 EEE®	85	CP 200 Conjunto de pistolas preurizadas para limpieza
29	Guata EEE®	87	ANIOSGEL Gel desinfectante por fricción hidroalcohólica
30	Planta de ropa de protección		Alianza Comercial EEE - Terragene
31	Bata quirúrgica desechable estéril de tela Spunlace®	89	Cintas testigo
32	Batas para cirujano reforzada en mangas y pecho DHIGIENEEE®	90	Controles químicos para lavado
33	Bata para cirujano DHIGIENEEE®	91	Controles biológicos autocontenidos para esterilización
34	Bata higiénica DHIGIENEEE®	93	Indicadores químicos
35	Bata para paciente de tela SMS DHIGIENEEE®	94	Incubadoras
36	Equipos y uniformes para cirujano DHIGIENEEE®		Alianza Comercial EEE - MATACHANA
37	Paquete de cirugía general estéril DHIGIENEEE®	96	Lavadoras termodesinfectadoras
38	Paquete universal para cirugía estéril DHIGIENEEE®	97	Esterilizadores de vapor
39	Paquete para artroscopia estéril DHIGIENEEE®	99	Miniclaves
40	Paquete para cabeza y cuello estéril DHIGIENEEE®	100	Esterilizadores de vapor a baja temperatura y formaldehído al 2%
41	Paquete para cesárea estéril DHIGIENEEE®	102	Esterilizadores a baja temperatura por peróxido de hidrógeno y plasma
42	Paquete para cirugía de catarata estéril DHIGIENEEE®		Alianza Comercial EEE - MEIKO
43	Paquete para extremidades estéril DHIGIENEEE®	104	Topic 20
44	Paquete general ortopédico estéril DHIGIENEEE®	104	Doyen SK10
45	Paquete para parto estéril DHIGIENEEE®		
46	Paquete para laparotomía estéril DHIGIENEEE®		

"Todas las imágenes de los productos son de carácter ilustrativo y pueden diferir de lo mostrado en este catálogo".

Bolsa de papel

grado médico para esterilizar PMG®

Bolsa de papel grado médico con porosidad controlada, hidrófugo para esterilizar con gas o vapor, con tratamiento antibacteriano, con reactivo químico impreso y sistema de apertura lateral con hilo.

Cumplen con las normas:

- ISO11607-1 Norma internacional que actualmente se acepta para empaques de esterilización.
- Normativas de la Comisión Europea de Estándares EN868 - 4.

Características:

- Uñero que facilita la apertura.
- Tratamiento Superanti®* (agente microbicida activo contra diversos tipos de bacterias).
- Doble franja termosoldable trasera y de fondo.
- Porosidad controlada.
- Amplia gama de tamaños.
- Apertura con hilo* - Pat. No. 291594.

*Opcional



Clave cuadro básico	Catálogo EEE	Ancho (cm)	Largo (cm)	Fuelle (cm)	Presentación
060.125.2695	PAR010	25	30	---	1000 piezas
060.125.2638	PAR022	6	15.5	3	1000 piezas
060.125.2760	PAR023	6	18	3	1000 piezas
060.125.2653	PAR026	7.5	23	4	1000 piezas
060.125.2679	PAR028	12	26	4	1000 piezas
060.125.2695	PAR029	14	33	4.5	1000 piezas
060.125.2711	PAR031	7.5	48	4	1000 piezas
060.125.2877	PAR032	18	33	6	1000 piezas
060.125.2869	PAR034	11	18	4	1000 piezas
---	PAR035	25	38	8	500 piezas
060.125.2844	PAR037	32	62	12	250 piezas
---	PAR038	38	51	12.5	250 piezas
---	PAR039	38	61	12.5	250 piezas
060.125.2836	SES015	25	38	8	250 piezas

PMG® y Superanti® son marcas registradas de Especialistas en Esterilización y Envase

Funda para biberón de papel grado médico


Características:

- Porosidad controlada.
- Alta resistencia al proceso de esterilización.

Clave cuadro básico	Catálogo EEE	Ancho (cm)	Largo (cm)	Fuelle (cm)	Presentación
060.125.2828	PAR013	9	12.5	5	1000 piezas
---	PAR018	6	12	3.5	1000 piezas



PAR018

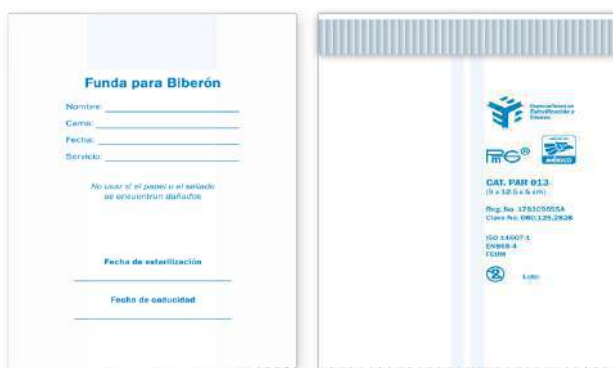

PAR013



Bolsas de papel PMG®

SES910

Bolsa de papel grado médico con porosidad controlada, hidrófugo para esterilizar con Gas o Vapor, con tratamiento antibacteriano, con reactivo químico impreso, sistema de apertura lateral con hilo y cartera integrada.

Clave cuadro básico	Catálogo EEE	Ancho (cm)	Largo (cm)	Fuelle (cm)	Presentación
060.125.2695	SES910 Cartera integrada	14	33	4.5	1000 piezas
		25	30	---	




Sistema de apertura lateral



PMG® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

Características:

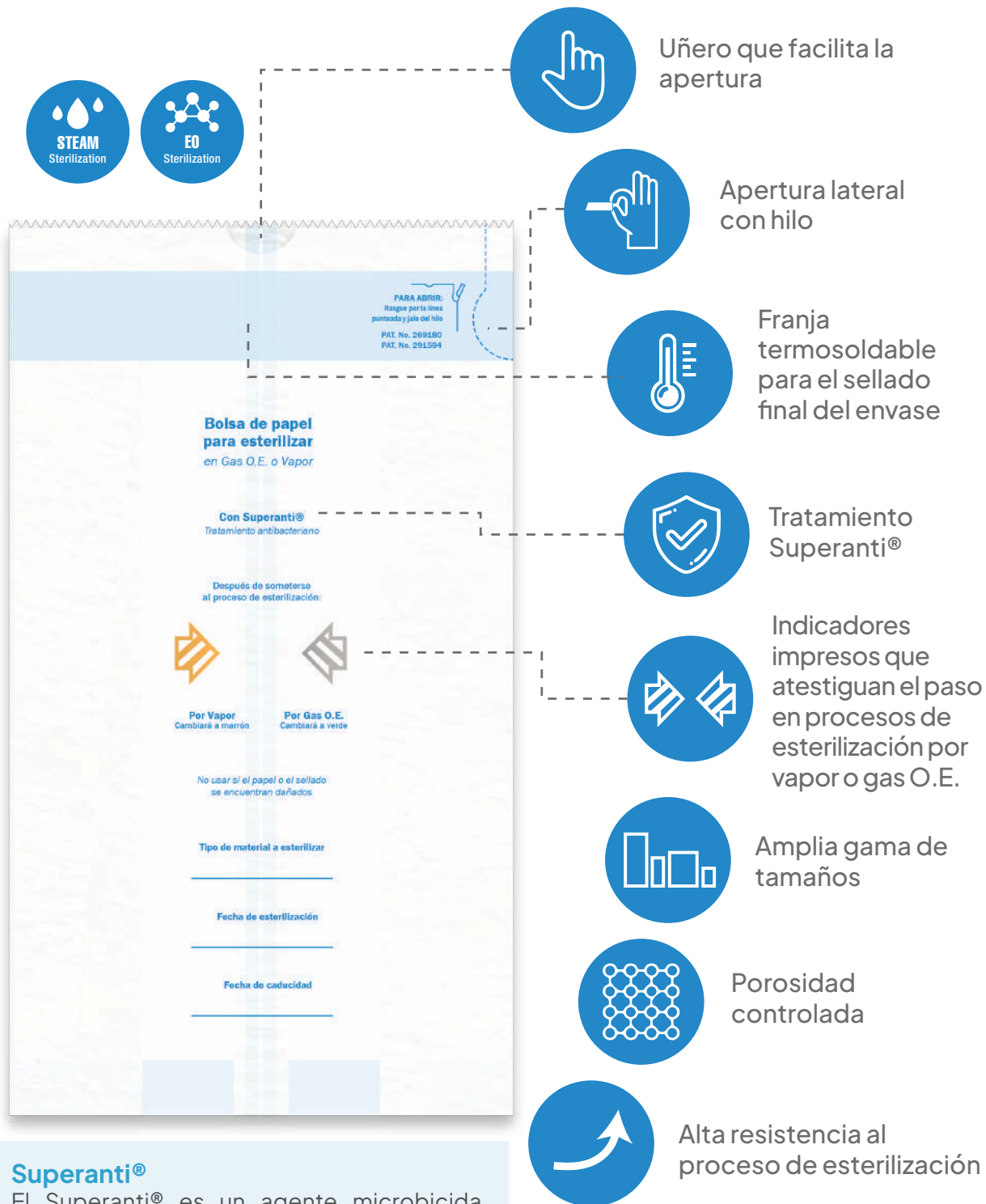

Superanti®

El Superanti® es un agente microbicida activo contra diversos tipos de microorganismos que impide su instalación y desarrollo. Su presencia disminuye la posibilidad de que el empaque se convierta en un vehículo contaminante en su exterior durante su manejo, transporte y almacenaje, así como al momento de su uso, coadyuvando a mantener el campo quirúrgico lo más aséptico posible.

Certificaciones:

ISO

9001:2015

ISO

13485:2016

Norma de calidad:

ISO 11607-1

EN 868-4

Superanti® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

Bolsas mixtas

de papel y plástico para esterilizar PMG®

Bolsas mixtas de papel grado médico y un complejo de plástico, especialmente indicado en el proceso de esterilización de material que precise la identificación visual desde el exterior del envase.



Cumplen con las normas:

- ISO11607-1 Norma internacional que actualmente se acepta para empaques de esterilización.
- Normativas de la Comisión Europea de Estándares EN868 - 5.

Características:

- Permite la identificación del contenido.
- Porosidad controlada.
- Alta resistencia al proceso de esterilización.
- Tratamiento Superanti®* (agente microbida activo contra diversos tipos de bacterias).
- Las bolsas poseen indicadores que atestiguan el paso de procesos de esterilización por Vapor, Gas O.E. y Formaldehído.
- Variedad de tamaños.

*Opcional

Clave cuadro básico	Catálogo	Ancho (cm)	Largo (cm)	Pzas. por caja
060.125.1861	PAR103	7.5	28	1000
---	PAR104	10	21	1000
---	PAR106	10	28	1000
060.125.1887	PAR107	10	42	1000
---	PAR109	15	21	1000
---	PAR110	15	28	1000
060.125.1960	PAR113	20	42	1000
---	PAR115	25	51	500
060.125.1895	PAR116	25	36	1000
---	PAR120	15	36	1000
060.125.1937	PAR124	7.5	58	1000
---	PAR137	30	36	1000
060.125.1945	PAR138	30	51	500
060.125.1929	PAR141	40	58	250
---	PAR173	22	28	1000

Bolsas mixtas con fuelle PMG®

Catálogo	Ancho (cm)	Largo (cm)	Fuelle (cm)	Pzas. por caja
PAR194	17.5	36	5	500
PAR196	20	42	5	500
PAR198	30	55	5	250

PMG® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

Características:



Certificaciones:

ISO **ISO**
9001:2015 13485:2016

Norma de calidad:

ISO 11607-1
EN 868-5

Superanti® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

Rollos mixtos

de papel y plástico para esterilizar PMG®



Rollos mixtos de papel grado médico y un complejo de plástico, especialmente indicado en el proceso de esterilización de material que precise la identificación visual desde el exterior del envase.

Cumplen con las normas:

- ISO11607-1 Norma internacional que actualmente se acepta para empaques de esterilización.
- Normativas de la Comisión Europea de Estándares EN868 - 5.

Características:

- Permite la identificación del contenido.
- Porosidad controlada.
- Alta resistencia al proceso de esterilización.
- Tratamiento Superanti®* (agente microbicida activo contra diversos tipos de bacterias).
- Los rollos poseen indicadores que atestiguan el paso de procesos de esterilización por Vapor, Gas O.E. y Formaldehído.
- Variedad de tamaños.
- Apertura lateral - Pat. No. 274349.

*Opcional

Rollos mixtos con fuelle PMG®

Catálogo	Ancho (cm)	Largo (m)	Fuelle (cm)	Pzas. por caja
PAR371	7.5	100	2	1
PAR373	10	100	4	1
PAR374	15	100	3	1
PAR375	20	100	4	1
PAR376	25	100	5	1
PAR377	30	100	5	1
PAR378	30	100	10	1
PAR379	38	100	10	1
PAR380	50	100	8	1

*Apertura lateral con +2cm


Rollos mixtos PMG®

Clave cuadro básico	Catálogo	Ancho (cm)	Largo (m)	Pzas. por caja
---	PAR354	5.1	200	1
060.125.3867	PAR361	7.5	200	1
---	PAR362	10	200	1
060.125.3875	PAR364	*15	200	1
---	PAR365	*20	200	1
---	PAR366	*25	200	1
060.125.3883	PAR367	*30	200	1
060.125.3891	PAR368	*40	200	1
---	PAR369	*50	200	1

*Apertura lateral con +2cm

PMG® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

Características:

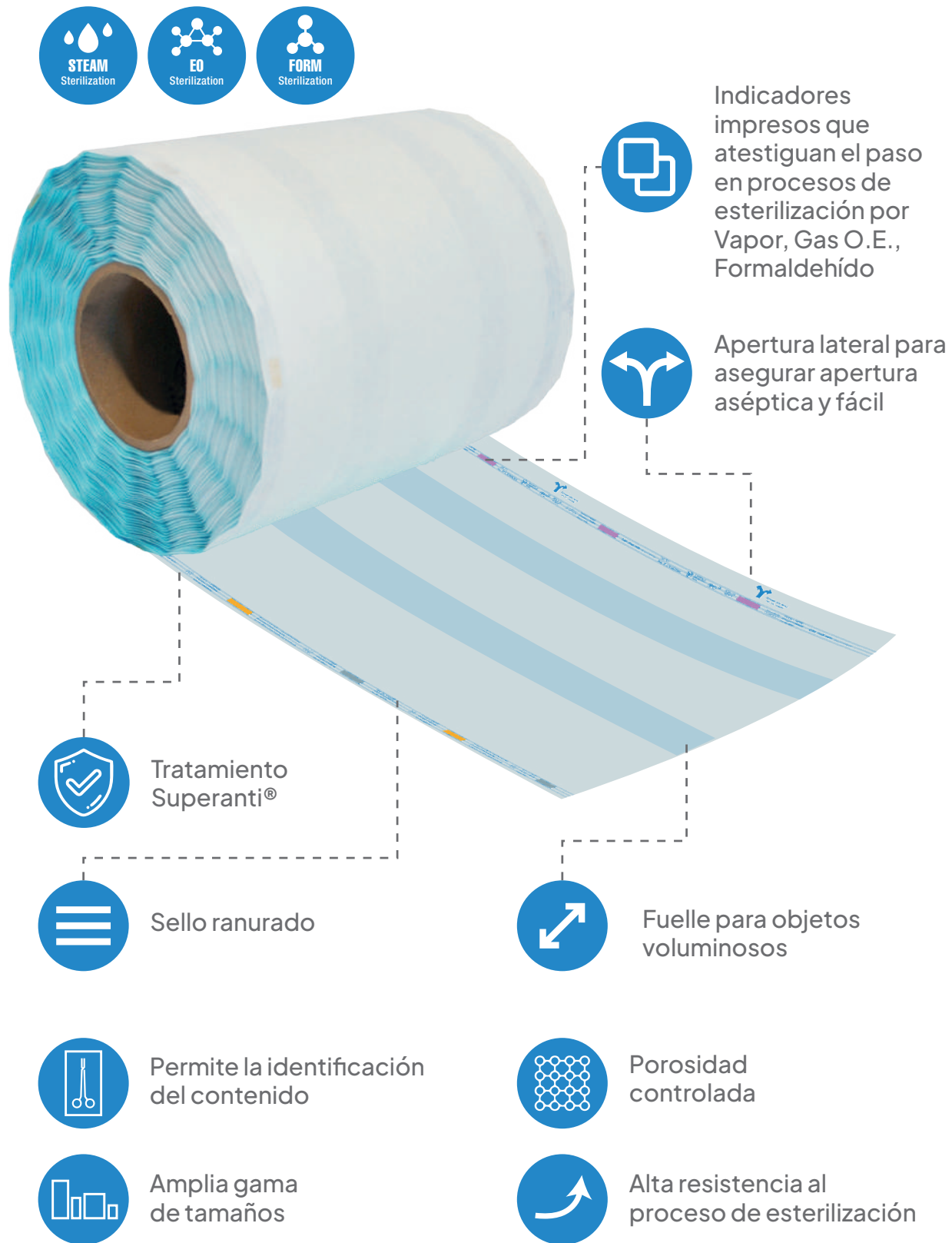

Certificaciones:

ISO 9001:2015 **ISO** 13485:2016

Norma de calidad:

ISO 11607-1
EN 868-5

Superanti® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

Envases mixtos con autosellado PMG®

Bolsas de papel grado médico con autosellado, nuestro nuevo sistema mejora el sellado respecto a las bolsas autosellables convencionales (con cierre por tira auto adhesiva y doblado). Simplemente deslizando la banda adhesiva (sin tener que ejercer presión con los dedos para adherirla) se logra un cierre rápido y seguro.



Cumplen con las normas:

- ISO11607-1 Norma internacional que actualmente se acepta para empaques de esterilización.
- Normativas de la Comisión Europea de Estándares EN868 - 5.

Características:

- Los envases poseen una banda autosellable.
- Permite la identificación del contenido.
- Porosidad controlada.
- Alta resistencia al proceso de esterilización.
- Tratamiento Superanti®* (agente microbicida activo contra diversos tipos de bacterias).
- Las bolsas poseen indicadores que atestiguan el paso de procesos de esterilización por Vapor, Gas O.E. y Formaldehído.
- Variedad de tamaños.

*Opcional

Bolsas mixtas con autosellado PMG®

Catálogo	Ancho (cm)	Largo (cm)	Pzas. por caja
PAR753D	9	23	200
PAR803D	7.5	28	200
PAR804D	10	13.5	200
PAR805D	10	23	200
PAR806D	9	26	200
PAR809D	13.5	25.5	200
PAR810D	13.5	35.6	200
PAR812D	20	33	200
PAR838D	30	38	200


Bolsas mixtas con autosellado y fuelle PMG®

Catálogo	Ancho (cm)	Largo (cm)	Fuelle (cm)	Pzas. por caja
PAR194D	17.5	36	5	500
PAR196D	20	42	5	500
PAR198D	30	55	5	250

Características:



Elaboradas con papel grado médico y un laminado de plástico

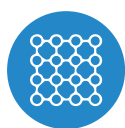

Porosidad controlada



Amplia gama de tamaños



Alta resistencia al proceso de esterilización

Certificaciones:

ISO

9001:2015

ISO

13485:2016

Norma de calidad:

ISO 11607-1

EN 868-5

Superanti® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

Rollos mixtos de Tyvek®

EEE®

- Envases diseñados para uso en procesos por Plasma de Peróxido de Hidrógeno, impresos con testigos químicos.
- Fabricadas con polietileno de alta densidad.
- Excelente resistencia de la penetración microbiana.
- Las fibras duras y continuas de Tyvek® ayudan a proteger la integridad del envase, del producto en el interior y manejo rudo exterior.
- Resistencia al desgarro y perforación.



Cumplen con las normas:

- ISO11607-1 Norma internacional que actualmente se acepta para empaques de esterilización.
- Normativas de la Comisión Europea de Estándares EN868 - 5.

Catálogo	Ancho (cm)	Largo (m)	Pzas. por caja
PAR461	7.5	70	1
PAR462	10	70	1
PAR464	15	70	1
PAR465	20	70	1
PAR466	25	70	1
PAR467	30	70	1
PAR468	40	70	1
PAR657	35	70	1
PAR658	60	70	1
PAR659	50	70	1

Catálogo	Ancho (cm)	Largo (m)	Pzas. por caja
PAR401	7.5	100	1
PAR402	10	100	1
PAR404	15	100	1
PAR405	20	100	1
PAR406	25	100	1
PAR407	30	100	1
PAR408	35	100	1
PAR409	40	100	1
PAR411	50	100	1

Tyvek® es marca registrada por Dupont™

Características:



Indicadores impresos para uso en procesos por Plasma de Peróxido de Hidrógeno



Sello ranurado



Permite la identificación del contenido




Excelente resistencia de la penetración microbiana



Resistencia al desgarro y perforación



Fabricados con polietileno de alta densidad

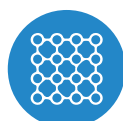

Porosidad controlada



Amplia gama de tamaños



Alta resistencia al proceso de esterilización

Certificaciones:

ISO

9001:2015

ISO

13485:2016

Norma de calidad:

ISO 11607-1
EN 868-5

Tyvek® es marca registrada por Dupont™

Rollos Ultra

Sistema de barrera estéril reforzada para el embalaje de dispositivos pesados y voluminosos y de bandejas de cirugía



Un revolucionario concepto de embalaje reforzado para dispositivos médicos reutilizables, que puede complementar o reemplazar el embalaje tradicional utilizado por los departamentos de esterilización de los hospitales.


Los SBE Ultra son casi irrompibles, permiten asegurar el mantenimiento de la esterilidad de los dispositivos y extender las fechas de caducidad en almacenamiento estéril.

Beneficios:

- Menor riesgo de estallido y reprocesamiento.
- Apertura aséptica sin desprendimiento de fibras o partículas.
- Mayor protección durante transporte y almacenamiento.
- Mantiene la esterilidad hasta 12 meses.*
- Visibilidad del contenido sin abrir el empaque.
- Menor volumen de residuos de embalaje.
- Cumple con EN 868-5 e ISO 11607-1.

**Probado en embalaje simple en ambiente hospitalario.*

PELÍCULA POROSA
de poliolefina

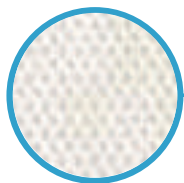

Mayor resistencia
a la perforación y
el rasgado

SELLADO DE SEGURIDAD



Reduce el riesgo
de estallido y
reprocesamiento



FILM TRANSPARENTE
azulado

Permite visualizar el
contenido de las bandejas
antes de abrirlas

Aplicaciones:

- Bandejas estándar (atención médica, dental).
- Bandejas quirúrgicas pesadas (ortopedia).
- Equipos de préstamo.
- Dispositivos complejos (de corte, afilados, frágiles, robóticos).
- RMD está generalmente embalado con bolsas de papel/película.



Código	Ancho (mm)	Largo (m)	Pzas. por caja
GUL050X070	50	70	5
GUL080X070	80	70	3
GUL120X070	120	70	2
GUL220X070	220	70	1
GUL250X070	250	70	1
GUL285X070	285	70	1
GUL320X070	320	70	1
GUL380X070	380	70	1
GUL420X070	420	70	1
GUL470X070	470	70	1
GUL520X070	520	70	1
GUL580X070	580	70	1
GUL750X070	750	70	1

Procesos de esterilización compatibles:

- Vapor.
- Peróxido de hidrógeno.
- Gas O.E.
- Formaldehído.
- Indicador de esterilización por vapor impreso intrafilm.



Máquina selladora

con pantalla touch EEE-1500mi



Selladora de empaques en continuo controlada por microprocesador. Diseñada específicamente para el cierre hermético por calor y presión de los envases grado médico para esterilización (bolsas de papel, bolsas y rollos mixtos con y sin fuelle de papel o Tyvek®) en el servicio de CEyE.

Características:

- Fabricada en acero inoxidable con base esmaltada, con bandas transportadoras para permitir el sellado continuo por calor.
- Área de calentamiento de sellado de 50 a 60 cm y ancho de sellado de 12 mm.
- Modo automático y manual para el control de la banda transportadora (con movimiento bidireccional).
- Con microprocesador y módulo de impresión automática: fechas de preparación y caducidad, código y nombre de operario, No. de lote, No. de serie y texto. Con cinta para el módulo de impresión de fácil reemplazo.
- Control de temperatura en rango de 50 a 200°C.
- Operación del menú vía pantalla táctil LCD, con despliegue de temperatura de sellado deseada y de trabajo.
- Funciones programables por el operario: horario y calendario (fecha de caducidad o preparación).
- Función de “Modo de Reposo”, para activarlo se debe tocar la pantalla en el recuadro “ENTRAR A MODO DE REPOSO” posteriormente toque el recuadro de aceptar, se apagarán las resistencias y se activará el motor por un periodo de 10 minutos para refrigerarse internamente, llegado el tiempo se apagará también la pantalla.
- Contador de bolsas que puede ser reiniciado.
- Alimentación eléctrica 127 VAC, 50/60Hz.
- Dimensiones: 23 cm alto x 62 cm largo x 26 cm ancho
- Peso Bruto: 25 kg.
- Incluye manual de usuario y de servicio.

Catálogo	Descripción
EEE1500MI	Máquina selladora
EEE0101	Mesa móvil para máquina selladora con tablero de acero inoxidable, con freno y ganchos laterales para canastilla
EEE0102	Canastilla lateral de acero inoxidable
EEE0104	Tablero deslizante de acero inoxidable
EEE0110	Mesa móvil con dos canastillas (EEE0101+EEE0102+EEE0102)
EEE0120	Rack porta canastillas de acero inoxidable
1098-1009	Cinta para impresión
TESI001	Prueba de verificación de sellado
TESI002	

Máquina selladora

EEE-1500 A



Diseñada específicamente para el cierre por calor y presión de los envases grado médico para esterilización (bolsas de papel, bolsas y rollos mixtos, con y sin fuelle, de papel o Tyvek®).

Características:

- Fabricada en acero inoxidable.
- Banda transportadora.
- Control digital de temperatura.
- Ancho del sello: 19 mm (+/- .1).
- Alimentación eléctrica 127 VAC, 50/60 Hz.
- Uso continuo las 24 hrs.
- Incluye manual de usuario y de servicio.
- Mínimo mantenimiento y 1 año de garantía.
- Peso Bruto: 12 kg / Peso Neto: 11.7 kg.
- Dimensiones del equipo (l x a x a): 43 x 30 x 17 cm.
- Dimensiones del embarque (l x a x a): 50 x 36 x 20 cm.



Catálogo	Descripción
EEE1500A	Máquina selladora
EEE0101	Mesa móvil para máquina selladora con tablero de acero inoxidable, con freno y ganchos laterales para canastilla
EEE0102	Canastilla lateral de acero inoxidable
EEE0104	Tablero deslizante de acero inoxidable
EEE0110	Mesa móvil con dos canastillas (EEE0101+EEE0102+EEE0102)
EEE0120	Rack porta canastillas de acero inoxidable
TESI001	Prueba de verificación de sellado
TESI002	



Prueba de verificación de sellado

COLOR TEST®

Sistema de prueba rutinaria de sello en máquina con banda rotativa

Un sellado óptimo sólo se puede garantizar si los parámetros se configuran correctamente y se adaptan al material que se desea sellar. Si se producen desviaciones en los parámetros (temperatura de sellado, tiempo de sellado y presión de contacto), esto se hace visible en la tira indicadora.

Instrucciones de uso:

A. Colocar la tarjeta de validación dentro de la bolsa, cuidando que la cara impresa esté directamente en contacto con el laminado y a la altura del sello.

B. Realizar el sellado normal de la bolsa con la tarjeta de validación. La temperatura de sellado recomendada para la prueba es:

- TESI001 180°C ± 5 para Bolsas y rollos mixtos de papel grado médico
- TESI002 130°C ± 5 para Bolsas de Tyvek®

C. La interpretación de resultados se deberá realizar colocando la bolsa con la tarjeta sobre una superficie oscura para visualizar mejor el recorrido del sello.

Nota: La tira indicadora COLOR TEST muestra si se cumplen o no las propiedades de calidad adecuadas, excluyendo una interpretación subjetiva de la costura de sellado; por lo tanto, el control diario del sello es indispensable.

Interpretación de resultados:

De acuerdo con la norma **ISO 11607-2: 2019**, las juntas de sellado deben mostrar las siguientes propiedades de calidad:

- Sellado intacto para un ancho de sello específico.
- No hay canales ni sellos abiertos.
- Sin pinchazos ni desgarros.
- Sin delaminación o separación de materiales.



Las siguientes fallas pueden aparecer durante un sello. En este caso, las propiedades de calidad para una costura de sellado no son las adecuadas:

1. Canales o sellos abiertos (sello no aprobado).



2. Pinchazos o desgarros (sello no aprobado).



3. Delaminación o separación de materiales: temperatura o presión de contacto demasiado baja (se sugiere programar un servicio de ajuste al equipo).



4. Arrugas en el sello: temperatura o presión de contacto demasiado alta (se sugiere programar un servicio de ajuste al equipo).



Catálogo	Presentaciones
TESI001	Paquete con 100 piezas
TESI002	Paquete con 100 piezas

Papel crepado grado médico

Primera generación

Material para envoltura que ofrece la mejor barrera bacteriana, el mayor costo/beneficio y es la opción más amigable con el ambiente.

Características:

- Fabricado de celulosa.
- Porosidad controlada.
- Con reactivos impresos para Gas O.E. y Vapor.
- Cumplen con las normas: EN ISO 11607-1:2019 y EN 868-2:2017.
- Se ofrece en paquetes de hojas, bobinas por kg y bobinas precortadas para facilitar su manejo.

Catálogo	Ancho (cm)	Largo (cm)	Paquete
PPC030030	30	30	250
PPC040040	40	40	250
PPC045045	45	45	250
PPC050050	50	50	250
PPC060060	60	60	250
PPC075075	75	75	250
PPC090090	90	90	250
PPC100100	100	100	250
PPC110110	110	110	200
PPC110120	110	120	200
PPC120120	120	120	200



Pliegos



Bobinas

Catálogo	Ancho (cm)	Peso (kg)	Paquete
BPC030_	30	—	1 rollo
BPC045_	45	—	1 rollo
BPC050_	50	—	1 rollo
BPC060_	60	—	1 rollo
BPC075_	75	—	1 rollo
BPC090_	90	—	1 rollo
BPC100_	100	—	1 rollo
BPC110_	110	—	1 rollo
BPC120_	120	—	1 rollo

_ Corresponde al requerimiento del peso de las bobinas.
Las presentaciones son: 5, 10, 15, 20 y 30 kg.

Papel crepado grado médico

Tercera generación

La gama de papel crepado azul de tercera generación está constituida de fibras de celulosa y fibras sintéticas reforzadas con ligantes sintéticos, lo que permite ser un envoltorio suficientemente resistente y maleable para poder envolver el material pesado o con aristas difíciles.

Características:


- Fabricado de celulosa, fibras sintéticas y ligantes sintéticos.
- Porosidad controlada.
- Con reactivos impresos para Gas O.E. y Vapor.
- Cumplen con las normas: **EN ISO 11607-1:2019 y EN 868-2:2017.**
- Se ofrece en paquetes de hojas y en bobinas con precorte para facilitar su manejo.



Pliegos

Catálogo	Ancho (cm)	Largo (cm)	Paquete
PPC030030T	30	30	250
PPC050050T	50	50	250
PPC055055T	55	55	250
PPC060060T	60	60	250
PPC075075T	75	75	250
PPC090090T	90	90	250
PPC090110T	90	110	250
PPC100100T	100	100	250
PPC110110T	110	110	200
PPC110120T	110	120	200
PPC120120T	120	120	200

Catálogo	Ancho (cm)	Peso (kg)	Paquete
BPC030_T	30	—	1 rollo
BPC045_T	45	—	1 rollo
BPC050_T	50	—	1 rollo
BPC055_T	55	—	1 rollo
BPC060_T	60	—	1 rollo
BPC075_T	75	—	1 rollo
BPC090_T	90	—	1 rollo
BPC100_T	100	—	1 rollo
BPC110_T	110	—	1 rollo

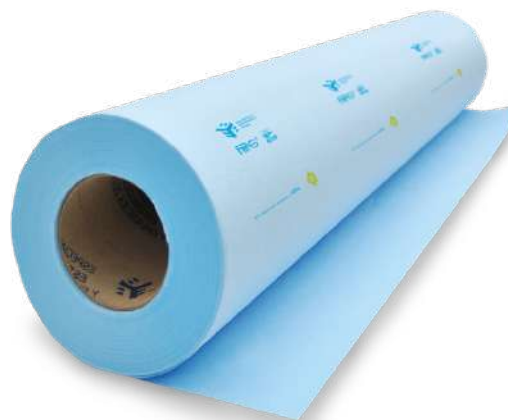

Bobinas

— Corresponde al requerimiento del peso de las bobinas.
Las presentaciones son: 5, 10, 15, 20 y 30 kg.

Papel crepado

Precortado grado médico PMG®



Primera generación:

Papel grado médico 100% celulosa que ofrece la mejor barrera bacteriana, el mayor costo beneficio y es la opción más amigable con el ambiente.

Tercera generación:

La gama de papel crepado azul de tercera generación está constituida de fibras de celulosa y fibras sintéticas reforzadas con ligantes sintéticos, lo que permite ser un envoltorio suficientemente resistente para poder envolver el material pesado o con aristas difíciles.

Características:

- Las bobinas llevan un precorte cada cierta distancia con la finalidad de facilitar su manejo.
- Puede solicitar que se numeren los pliegos a la altura del precorte. Esta impresión le facilitará la ubicación de la marca del precorte además de que le permitirá saber cuántos pliegos le quedan para poder administrar mejor sus bobinas.
- Con reactivos impresos que indican el paso por el proceso de esterilización a Vapor o Gas O.E.
- Cumplen con las normas: **EN ISO 11607-1:2019 y EN 868-2:2017.**

Catálogo	Ancho (cm)	Precorte (cm)	Peso (kg)	Presentación
BPCP020030005	20	30	5	1 bobina
BPCP030030005	30	30	5	1 bobina
BPCP040040005	40	40	5	1 bobina
BPCP050050005	50	50	5	1 bobina
BPCP060060005	60	60	5	1 bobina
BPCP075075005	75	75	5	1 bobina
BPCP090090005	90	90	5	1 bobina
BPCP100100005	100	100	5	1 bobina
BPCP110110005	110	110	5	1 bobina
BPCP120120005	120	120	5	1 bobina
Bobinas				

PMG® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

Características:




Fabricado con celulosa, fibras sintéticas y ligantes sintéticos



Fabricado con celulosa




Indicadores impresos que atestiguan el paso en procesos de esterilización por vapor o gas O.E.

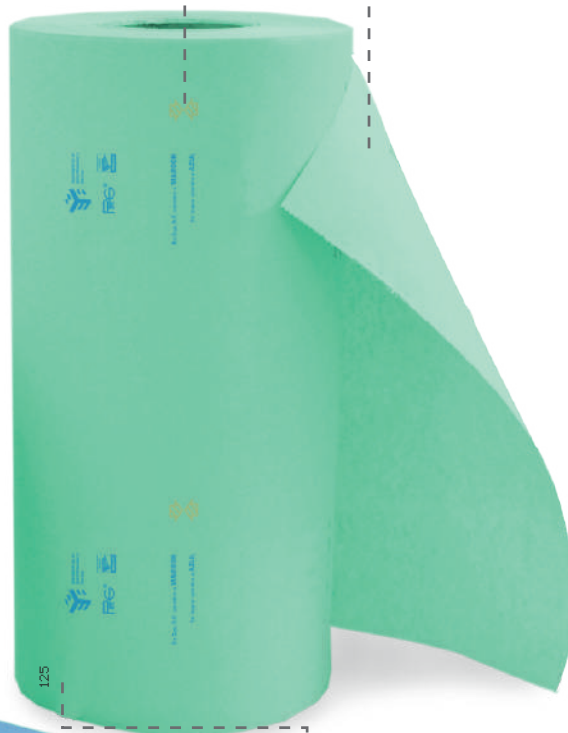

Precorte a cada cierta distancia (opcional)



Numeración de pliegos (opcional)

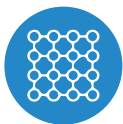

Porosidad controlada



Alta resistencia al proceso de esterilización



Amplia gama de tamaños

Norma de calidad:

ISO 11607-1
EN 868-2

PMG® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

Campos de tela SMS

Material de envoltura de un solo uso, suministrado no estéril, para empacar dispositivos médicos y esterilizarlos a fin de crear y preservar un sistema de barrera estéril.

Compuesto por fibras 100% sintéticas fabricadas de Polipropileno SMS: Spunbond / Meltblown / Spunbond.

Los campos de SMS para esterilizar son excelentes sistemas de barrera estéril, de alta calidad utilizado en la CEyE en hospitales y clínicas.



Se puede utilizar en procesos por: Vapor, Gas OE, Formaldehído y Peróxido de Hidrógeno Vaporizado H₂O₂.

35 gramos

Catálogo	Ancho (m)	Largo (m)	Presentación (piezas)
A37F97	0.30	0.30	250
A37F67	0.50	0.50	250
A37F75	0.75	0.75	250
A37F66	1.00	1.00	250
A37F69	1.10	1.20	100

50 gramos

Catálogo	Ancho (m)	Largo (m)	Presentación (piezas)
A54F97	0.30	0.30	250
A54F381	0.40	0.40	250
A54F67	0.50	0.50	250
A54F176	0.60	0.60	250
A54F75	0.75	0.75	250
A54F86	0.90	0.90	250
A54F66	1.00	1.00	250
A54F574	1.10	1.10	250
A54F69	1.10	1.20	250
A54F642	1.14	1.14	250
A54F60	1.20	1.20	250

70 gramos

Catálogo	Ancho (m)	Largo (m)	Presentación (piezas)
A74F176	0.60	0.60	250
A74F923	0.75	0.75	100
A74F66	1.00	1.00	100
A74F924	1.14	1.14	100
A74F60	1.20	1.20	100



EEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

Desbobinador con sistema de corte

con cuchilla de acero para rollo mixto de papel grado médico



Características:

- Barras de acero rectificado.
- No requiere alimentación eléctrica.

Catálogo	Descripción	Presentación
EEE0302	Dispensador de papel con sistema de corte de 1.40 m	1 equipo
EEE0303	Dispensador de papel con sistema de corte de 0.80 m	1 equipo

Desarrollamos

Envases para dispositivos médicos

Solución de envasado e impresión en papel grado médico y película plástica. Las bobinas se caracterizan por su alta peleabilidad y son ideales para procesos de esterilización.



Prueba de Bowie & Dick COLOR TEST®

Dispositivos a monitorear la ausencia o presencia de burbujas de aire dentro de la cámara del esterilizador.

Características:

- Impreso con tinta termo crómica, plastificada y no tóxica.
- Hoja con indicador químico sensible al Vapor a 134 °C - 138 °C en un tiempo de 3.5 a 4 minutos.
- Área impresa para registro de datos como fecha, esterilizador y número de ciclo.
- Prueba recubierta de capas de papel crepado verde grado médico o papel blanco grado médico.
- Dimensiones: 11.0 x 12.0 x 2.8 cm.
- Peso: 250 g.



PBD003
Paquete listo para usar

Frecuencia de la prueba

Su uso es recomendado en el primer ciclo de esterilización del día.

Catálogo	Uso en	Descripción	Pzas. por caja
PBD003	Vapor	Prueba Mini Bowie and Dick	1

Cintas testigo Esteritech®


Cinta adhesiva con indicador químico que testifica el paso de envases y paquetes por los procesos de esterilización en Vapor o Gas Óxido de Etileno. Ambas cintas son libres de plomo.



Catálogo	Uso en	Descripción	Pzas. por caja
CTG001	Gas O.E.	Cinta testigo 1.8 cm x 50 m	48
CTV001	Vapor	Cinta testigo 1.8 cm x 50 m	48

Puntos de Formaldehído COLOR TEST®

Cinta adhesiva con indicador químico que testifica el paso de envases y paquetes por los procesos de esterilización en Vapor o Gas Óxido de Etileno. Ambas cintas son libres de plomo.

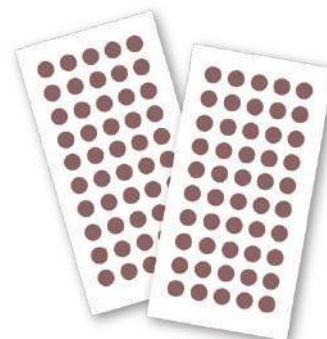

Catálogo	Uso en	Descripción	Pzas. por caja
CFQ250P	Formaldehído	Puntos adhesivos de 4 x 2 mm	250

COLOR TEST® y Esteritech® son marcas registradas de Especialistas en Esterilización y Envase

Controles químicos

COLOR TEST®



Los controles químicos monitorean uno o más de los parámetros críticos que intervienen en un ciclo de esterilización, confirmando que se han cumplido ciertas condiciones necesarias en el ciclo.

Características:

- Impresos con tintas no tóxicas (libres de plomo) y plastificada.
- Estables a través del tiempo.
- De fácil lectura e interpretación.
- Específicos para cada método de esterilización.
- Periodicidad: En cada ciclo y en cada paquete.

Catálogo	Uso en	Descripción	Pzas. por caja
CFQ228B	Vapor	Tiras de 20 x 190 mm	250
CFQ232	Vapor	Tiras de 20 x 110 mm	250
CFQ238	Calor seco	Tiras de 20 x 110 mm	250
CFQ243	Gas O.E.	Tiras de 20 x 110 mm	250
CFQ250	Formaldehído	Tiras de 20 x 110 mm	250
CFQ261C	H ₂ O ₂	Tiras de 20 x 110 mm	250

Control químico

Integrador de esterilización Tipo 5

COLOR TEST®




Indicador químico de lectura instantánea de frente progresivo, diseñado para controlar la eficacia de la esterilización con vapor. Puede usarse en cualquier esterilizador a vapor de desplazamiento gravitatorio o de pre vacío que opere entre 121°C y 135°C.

Aceptar



Examine el Integrador COLOR TEST para determinar que la barra oscura pasó el área roja de INCOMPLETO y llegó al área verde de COMPLETO. Esto asegura que se han cumplido los parámetros de esterilización.

Rechazar

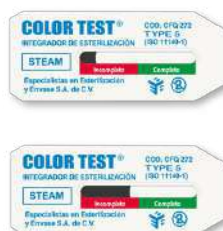

Si la barra oscura no alcanzó el área verde de COMPLETO, indica que no se han cumplido los parámetros de esterilización.

Catálogo	Descripción	Pzas. por paquete
CFQ272	Control químico de esterilización en vapor. Tiras de avance frontal, Tipo 5	250

COLOR TEST® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

Incubadora Dual

IC10 / 20 EEE®

Incubadora para Indicadores Biológicos y para Sistemas de Monitoreo de Higiene a $(37 \pm 2)^\circ\text{C}$ o $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$.

Características:

- Dimensiones: 12.0 cm de alto, 12.3 cm de diámetro.
- 10 posiciones (1.3 cm de diámetro, 3.0 cm de profundidad) para incubar BT23, medios de cultivo y lápiz de detección de proteínas 26 posiciones (0.9 cm de diámetro, 3.0 cm de profundidad) para incubar BT10, BT20, BT30, BT80, BT90, BT91, BT100, BT101, BT200, BT202, BT21, BT22, BT24.
- Orificio especial para termómetro externo.
- 1 rompe ampollas.
- Rango de voltaje: 100 - 240 V CA Potencia 20 W.
- Frecuencia: 50 - 60 Hz.



Normativa aplicable:

- Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485 2016/NS-EN ISO 13485:2016.
- Directiva Bajo Voltaje 2014/35/UE.
- Directiva CEM 2014/30/UE.
- Directiva RoHS 2011/65/UE.
- Directiva RAEE 2012/19/UE.



Catálogo	Descripción	Pzas. por caja
IC10 / 20 EEE	Incubadora dual para controles biológicos	1 equipo

Guata Quirúrgica EEE®

Rollos de guata quirúrgica de tela no tejida de algodón



Clave cuadro básico	Catálogo EEE	Largo (m)	Ancho (cm)	Presentación
060.461.0147	RCQ005005	5	5	Envase con 24 piezas
060.461.0154	RGQ010005	5	10	Envase con 24 piezas
060.461.0162	RGQ015005	5	15	Envase con 24 piezas
060.461.0188	RGQ020005	5	20	Envase con 24 piezas

EEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

Planta de Ropa de Protección

EEE cuenta con una planta que fabrica ropa desechable, las instalaciones están ubicadas en Chapala, Jalisco, la cual inició operaciones en 1999. Actualmente se integra por 120 colaboradores.



Certificaciones:



ISO 9001:2015



Buenas Prácticas de Fabricación
acorde a la NOM-241-SSA-2021



Materiales de alta calidad:

EEE fabrica prendas y paquetes quirúrgicos desechables con los siguientes materiales:

- Tela no tejida 100% polipropileno SMS se crea utilizando lo mejor de las tecnologías **Spunbond** y **Meltblown**, estos resistentes tejidos tienen atributos que los hacen prevalecer en aplicaciones sanitarias y de higiene, en las que solo los estándares más elevados son válidos.
- La tela no tejida **Spunlace®** proporciona prendas médicas muy cómodas de llevar y que cumplen las normas internacionales sobre productos, minimizando el riesgo de infecciones.

Nuestra finalidad es ofrecer al usuario productos con propiedades repelentes, que proporcionan la protección y el máximo confort que buscan los profesionales de la salud.

Spunlace® es una marca registrada de Jacob Holm.

Bata quirúrgica desechable estéril

Tela Spunlace®

Nuestra bata combina protección, comodidad e higiene. Ofreciendo una solución eficiente para entornos donde la seguridad y el bienestar del usuario son prioridad.

Características:


- Alta suavidad.
- Gramaje de Spunlace® de 68 g/m².
- Excelente absorción a líquidos.
- Transpirable y cómoda.
- Ideal para uso prolongado y contacto directo con la piel.
- Antiestática y resistente a la tensión.
- Estéril.
- Desechable.



Puños
ajustables



Cintas
de amarre

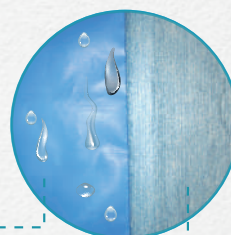

Cierre en cuello
mediante velcro



Protector impermeable a la
penetración de líquidos y fluidos

Tela Spunlace®



Tarjeta de
transferencia

Catálogo

K05E329

Talla

Extra
grande

Presentación

Pieza
Caja con 22

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

"Las imágenes de los productos son de carácter ilustrativo y pueden diferir de lo mostrado en este catálogo".



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Bata desechable para cirujano

Reforzada en mangas y pecho

Características:

- Material: tela no tejida 100% polipropileno SMS.
- Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos.
- Antiestática y resistente a la tensión.
- Libre de desprendimiento de partículas.
- Sistema de ajuste al cuello y cintura por medio de cintas de amarre.
- Puños ajustables de algodón.
- Refuerzo en mangas y pecho.
- Incluye tarjeta de transferencia.
- Estéril y desechable.



Clave de Cuadro Básico	Catálogo	Talla	Presentaciones
060.231.0674	M37B448	Chica	Pieza Caja con 35
060.231.0666	M37C454	Mediana	Pieza Caja con 35
060.231.0641	M37D448	Grande	Pieza Caja con 30
060.231.0658	M37E455	Extra grande	Pieza Caja con 25



Refuerzo en mangas y pecho



Puños ajustables



Tarjeta de transferencia

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

"Las imágenes de los productos son de carácter ilustrativo y pueden diferir de lo mostrado en este catálogo".

Bata desechable

para cirujano

DHIGIENEEE®

Características:

- Material tela no tejida 100% polipropileno SMS.
- Gramaje de 35 +/-1 g/m2.
- Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos.
- Antiestática y resistente a la tensión.
- Libre de desprendimiento de partículas.
- Sistema de ajuste al cuello y cintura por medio de cintas de amarre.



Catálogo	Descripción	Presentación
M37D04	Batano estéril	Pieza
		Caja con 50
M37D06	Bata estéril	Pieza
		Caja con 35
M37D126	Bata estéril con toalla	Pieza
		Caja con 35




Bata higiénica desechable

A33D01

Características:

- Material tela no tejida 100% polipropileno SMS.
- Gramaje de 30 +/-1 g/m².
- Resistente a la penetración de líquidos.
- Libre de desprendimiento de partículas.
- Sistema de cierre en la parte frontal por medio de velcro.
- Puños ajustables por medio de elástico en las muñecas.
- Desechable.
- No estéril.

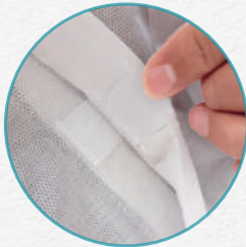

Cierre mediante velcro



Puños ajustables



Catálogo	Presentación	Color
A33D01	Pieza	Blanco
	Caja con 60	

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

"Las imágenes de los productos son de carácter ilustrativo y pueden diferir de lo mostrado en este catálogo".



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Batas para paciente de tela SMS

A37A001 | A37D001

Características:

- Material tela no tejida 100% polipropileno SMS.
- Gramaje de 35 +/-1 g/m².
- Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos.
- Antiestática y resistente a la tensión.
- Libre de desprendimiento de partículas.
- Sistema de ajuste al cuello y cintura por medio de cintas de amarre.
- Desechable.
- No estéril.



Catálogo	Talla	Presentación	Descripción
A37A001	Infantil	Pieza	Bata con manga corta
		Caja con 120	
A37D001	Adulto	Pieza	Bata con manga corta
		Caja con 80	

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

"Las imágenes de los productos son de carácter ilustrativo y pueden diferir de lo mostrado en este catálogo".



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Equipos y uniformes para cirujano

de tela SMS

Características:

- Fabricado con tela SMS.
- Gramaje 35 +/- 1 g/m².
- Material 100% polipropileno.
- Resistente a la penetración de líquidos.
- Resistente a la tensión.
- No estéril.
- Color azul.

Equipos

Contenido:

- 1 Gorro para cirujano
- 1 Cubre bocas
- 1 Filipina
- 1 Pantalón
- 1 Par de botas

Catálogo	Talla	Presentación
A37C025	Mediano	Caja con 40
A37D025	Grande	Caja con 40
A37E025	Extra grande	Caja con 40

Uniformes

Contenido:

- 1 Filipina
- 1 Pantalón

Catálogo	Talla	Presentación
A37A070	Extra chico	Caja con 60
A37B070	Chico	Caja con 60
A37C070	Mediano	Caja con 50
A37D070	Grande	Caja con 50
A37E070	Extra grande	Caja con 50



Pueden personalizarse con su logotipo corporativo.

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

"Las imágenes de los productos son de carácter ilustrativo y pueden diferir de lo mostrado en este catálogo".



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeeee.com



www.grupoeeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Paquete de cirugía general (estéril)


M37G45

Características:


-  Fabricado con tela SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 35 ± 1 g/m².
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Resistente a la tensión.
-  Color azul.

Composición del paquete:


- A. 1 Bata para instrumentista, con toalla para manos.
- B. 1 Funda para charola de mayo, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 0.58 x 1.37 m.
- C. 2 Batas quirúrgicas talla grande con toalla para manos para cirujano.
- D. 4 Campos con cinta adhesiva, 0.9 x 0.9 m.
- E. 1 Cubierta repelente para mesa de instrumental, 1.5 x 2.0 m.
- F. 1 sábana hendida de 2.0 x 2.4 m con fenestración de 0.10 x 0.30 m con cinta adhesiva y zona absorbente con porta cordones.
- G. 1 Sábana cefálica, 1.5 x 2.0 m.
- H. 1 Sábana podálica, 1.5 x 2.0 m.

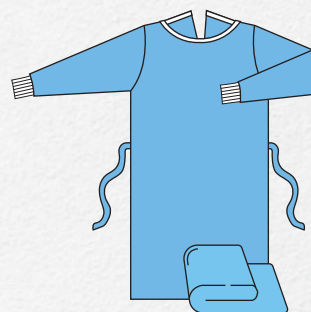

A. 1 bata para instrumentista con toalla para manos

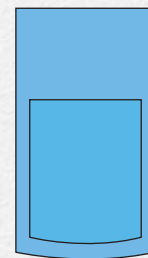


B. 1 funda para charola de mayo

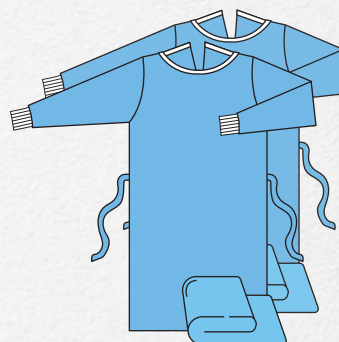


C. 2 batas para cirujano con toalla para manos




D. 4 campos con cinta adhesiva

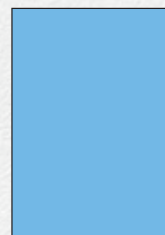


E. 1 cubierta para mesa de instrumental

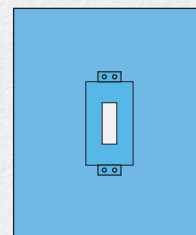

F. 1 sábana hendida

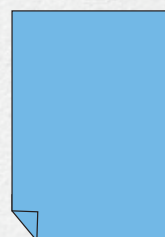

G. 1 sábana cefálica

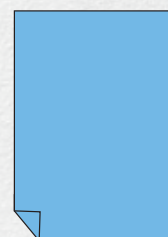

H. 1 sábana podálica

Presentaciones

Código: M37G45

Pieza | Caja con 5

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Paquete universal para cirugía (estéril)


M37G931

Características:


-  Fabricado con tela SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 35 ± 1 g/m².
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Resistente a la tensión.
-  Color azul.

Composición del paquete:


- A. 1 Bata mediana con toalla para manos para instrumentista.
- B. 1 Funda para charola de mayo, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 0.58 x 1.37 m.
- C. 2 Batas quirúrgicas talla grande con toalla para manos para cirujano.
- D. 1 Cubierta para mesa de riñón, 1.27 x 2.23 $\pm$ 0.10 m.
- E. 4 Campos adhesivos, 0.7 x 0.5 $\pm$ 0.10 m.
- F. 1 Bolsa de papel grado médico para suturas.
- G. 1 Sábana superior, 1.5 x 1.9 $\pm$ 0.10 m.
- H. 1 Sábana inferior, 1.75 x 2.0 $\pm$ 0.10 m.
- I. 2 Sábanas laterales, 1.3 x 1.8 $\pm$ 0.10 m.

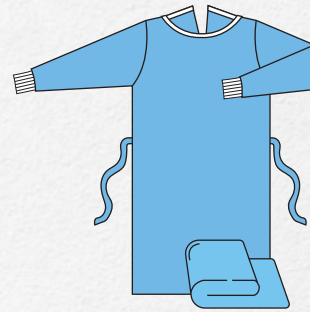


A. 1 bata para instrumentista con toalla para manos

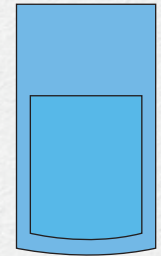

B. 1 funda para charola de mayo

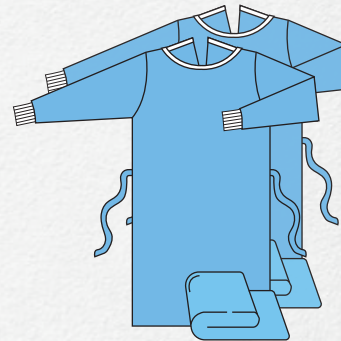

C. 2 Batas para cirujano con toalla para manos

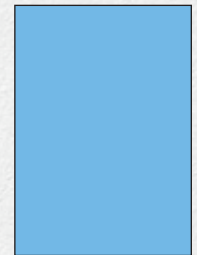


D. 1 cubierta para mesa de riñón




E. 4 campos adhesivos




F. 1 bolsa para suturas

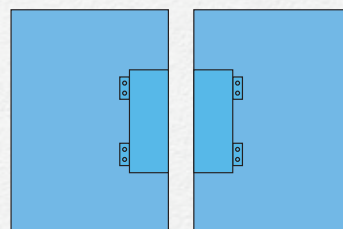

I. 2 sábanas laterales

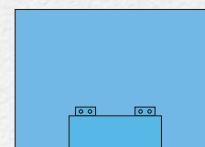

G. 1 sábana superior

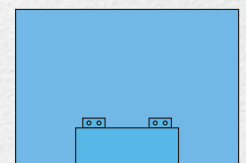

H. 1 sábana inferior

Presentaciones

Código: M37G931

Pieza | Caja con 5

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Paquete para artroscopia (estéril)


M37G932

Características:


-  Fabricado con tela SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 35 ± 1 g/m².
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Resistente a la tensión.
-  Color azul.

Composición del paquete:


- A. 1 bata para instrumentista con toalla para manos.
- B. 1 funda para charola de mayo, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 0.58 x 1.37 m.
- C. 2 batas grandes para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. 2 toallas para manos.
- D. 1 estoquinete impermeable, 0.31 x 1.26 m.
- E. 1 campo de 0.75 x 0.75 m.
- F. 1 Cintas para sujetar el estoquinete, 0.11 x 0.51 m.
- G. 1 bolsa para suturas de papel grado médico.
- H. 1 cubierta para mesa de riñón, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 1.28 x 2.6 m.
- I. 2 campos de polietileno en forma de "U" para cirugía, 1.52 x 1.77 m.
- J. 1 sábana de especialidad de 2.4 x 3.0 m.

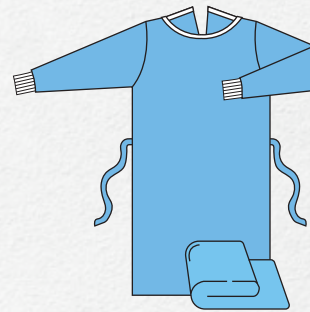

A. 1 bata para instrumentista con toalla para manos

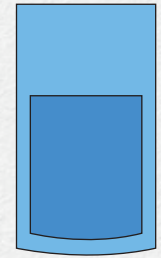

B. 1 funda para charola de mayo

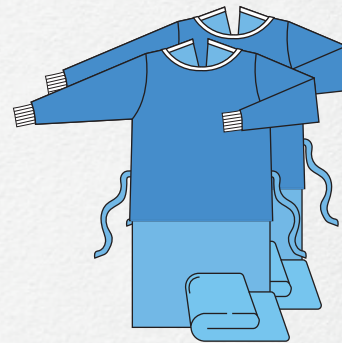


C. 2 Batas para cirujano reforzadas, con toalla para manos




D. 1 estoquinete impermeable




E. 1 Campo

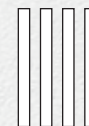


F. Cintas

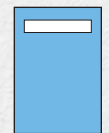


G. 1 bolsa para suturas

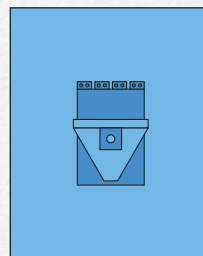

J. 1 sábana de especialidad

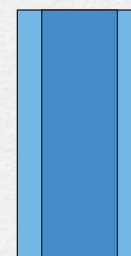

H. 1 cubierta para mesa de riñón

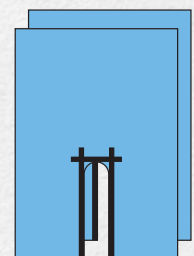

I. 2 campos en forma de "U"

Presentaciones

Código: M37G932

Pieza | Caja con 4

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Paquete para cabeza y cuello (estéril)


M37G928

Características:


-  Fabricado con tela SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 35 ± 1 g/m².
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Resistente a la tensión.
-  Color azul.

Composición del paquete:


- A. 1 Bata para instrumentista, con toalla para manos.
- B. 1 Funda para charola de mayo, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 0.58 x 1.37 m.
- C. 1 Bata talla grande para cirujano, con toalla para manos.
- D. 1 cubierta para mesa de riñón, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 1.12 x 2.29 m.
- E. 1 Campo para cabeza, 1.07 x 0.86 m.
- F. 2 Campos con tira adhesiva, 0.7 x 0.5 m.
- G. 1 sábana hendida de 1.96 x 2.95 m, fenestrado en forma de "U", con refuerzo absorbente y ojales porta cables.
- H. 1 bolsa para suturas de papel grado médico.

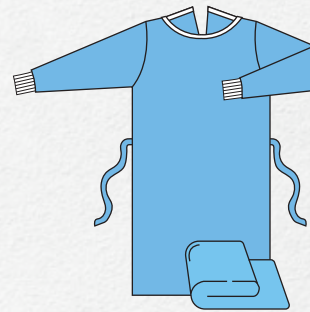


A. 1 bata para instrumentista con toalla para manos

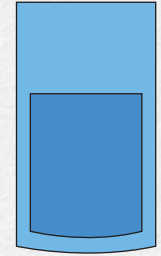


B. 1 funda para charola de mayo

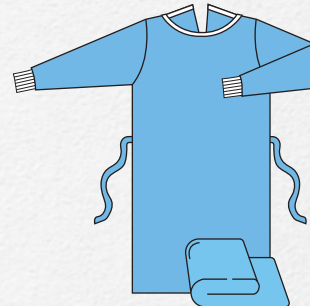


C. 1 bata para cirujano con toalla para manos

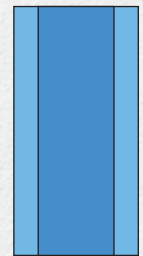


D. 1 cubierta para mesa de riñón

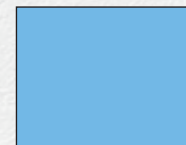

E. 1 campo para cabeza

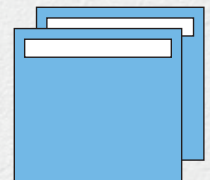

F. 2 campos con tira adhesiva

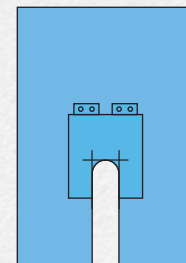

G. 1 sábana con fenestrado en "U"



H. 1 bolsa para suturas

Presentaciones

Código: M37G928

Pieza | Caja con 7

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Paquete de cesárea (estéril)


M37G10

Características:


-  Fabricado con tela SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 35 ± 1 g/m².
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Resistente a la tensión.
-  Color azul.

Composición del paquete:


- A. 1 Bata para instrumentista, con toalla para manos.
- B. 1 Funda para charola de mayo, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 0.58 x 1.37 m.
- C. 2 Batas quirúrgicas talla grande para cirujano, con toalla para manos.
- D. 1 cubierta repelente para mesa de instrumental, 1.5 x 2.0 m.
- E. 1 sábana para recibir al bebé, 0.75 x 0.8 m.
- F. 4 campos con cinta adhesiva, 0.9 x 0.9 m.
- G. 1 sábana cefálica, 1.5 X 2.0 m.
- H. 1 sábana podálica, 1.5 X 2.0 m.
- I. 1 sábana hendida de 2.0 x 2.4 m con fenestración de 0.27 x 0.27 m con cinta adhesiva y zona absorbente con porta cordones.

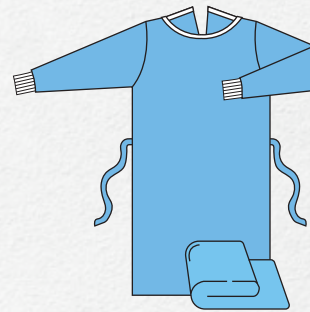


A. 1 bata para instrumentista con toalla para manos

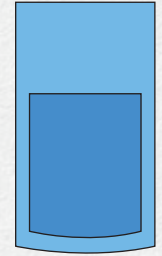

B. 1 funda para charola de mayo

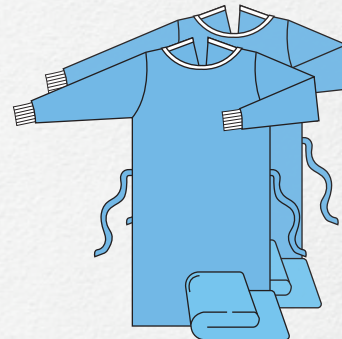

C. 2 batas para cirujano con toalla para manos

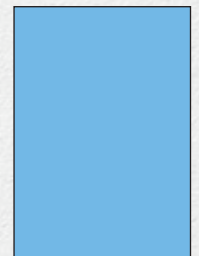

D. 1 cubierta para mesa de instrumental



E. 1 sábana para recibir al bebé



F. 4 campos con cinta adhesiva


Presentaciones

Código: M37G10


Pieza | Caja con 5

DHIGIENEEE®


DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

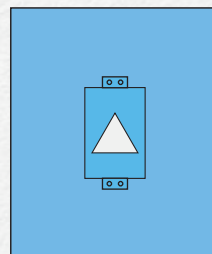

I. 1 sábana hendida

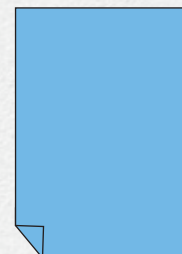

G. 1 sábana cefálica

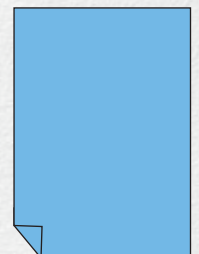


H. 1 sábana podálica

Paquete para cirugía de catarata (estéril)

M37G429


Características:

-  Fabricado con tela SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 35 ± 1 g/m².
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Resistente a la tensión.
-  Color azul.

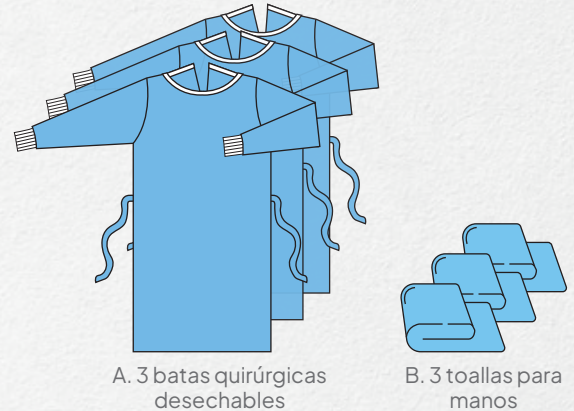

Composición del paquete:


- A. 3 batas desechables para uso quirúrgico.
- B. 3 toallas absorbentes para manos.
- C. 4 campos adheribles, 0.8 x 0.8 m.
- D. 1 funda para charola de mayo, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 0.58 x 1.37 m.
- E. 2 sábanas podálicas, 1.5 x 2.0 m.
- F. 1 cubierta para mesa de riñón, 1.5 x 2.0 m.

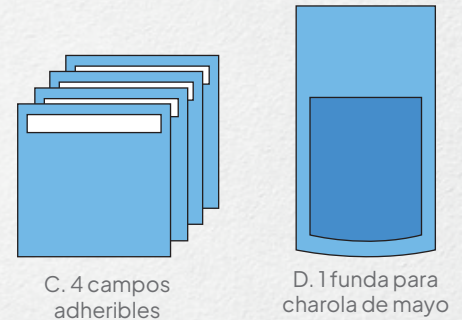

Presentaciones

Código: M37G429

Pieza | Caja con 7

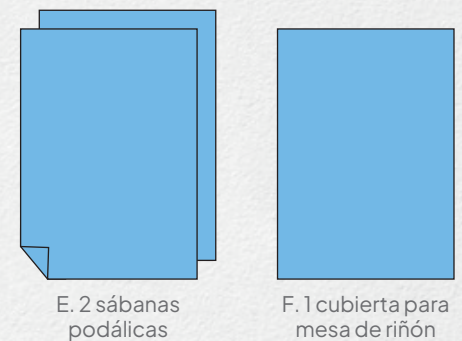

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

Paquete para extremidades (estéril)


M37G929

Características:


-  Fabricado con tela SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 35 ± 1 g/m².
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Resistente a la tensión.
-  Color azul.

Composición del paquete:


- A. 2 batas grandes para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. 2 toallas para manos.
- B. 1 Funda para charola de mayo, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 0.58 x 1.37 m.
- C. 1 Campo de polietileno, 1.52 x 1.12 m.
- D. 3 Campos con tira adhesiva, 0.7 x 0.5 m.
- E. 1 sábana de 2.21 x 3.26 m, con fenestrado circular elástico, con refuerzo absorbente y ojales porta cables.
- F. 1 cubierta para mesa de riñón, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 1.27 x 2.29 m.
- G. 1 Bolsa para suturas de papel grado médico.

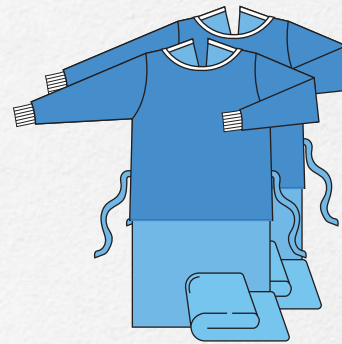

A. 2 Batas para cirujano reforzadas, con toalla para manos

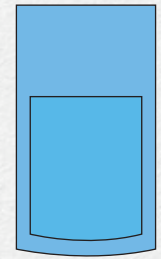


B. 1 funda para charola de mayo

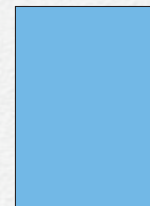


C. 1 campo de polietileno



D. 3 campos con tira adhesiva

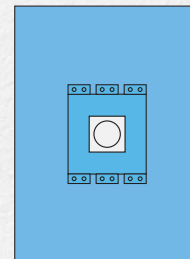

E. 1 sábana con fenestrado

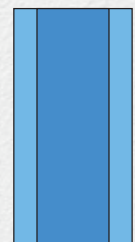

F. 1 cubierta para mesa de riñón



G. 1 bolsa para suturas

Presentaciones

Código: M37G929

Pieza | Caja con 5

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Paquete general ortopédico (estéril)


M37G930

Características:


-  Fabricado con tela SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 35 ± 1 g/m².
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Resistente a la tensión.
-  Color azul.

Composición del paquete:

- A. 2 batas grandes para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. 2 toallas para manos.
- B. 1 Funda para charola de mayo, de polietileno con refuerzo absorbente, 0.58 x 1.37 m.
- C. 4 campos con tira adhesiva, 0.7 x 0.5 m.
- D. 1 Bolsa para suturas de papel grado médico.
- E. 1 Estoquinete impermeable, 0.31 x 1.26 m.
- F. 1 Cubierta para mesa de riñón, 1.27 x 2.23 m.
- G. 1 Sábana de 1.96 x 2.54 m, fenestrado en forma de "U" con refuerzo absorbente.
- H. 1 Campo de polietileno en forma de "U" con tira adhesiva,

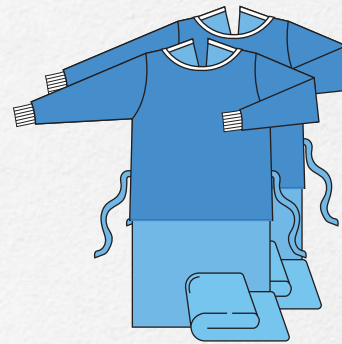

A. 2 Batas para cirujano reforzadas, con toalla para manos

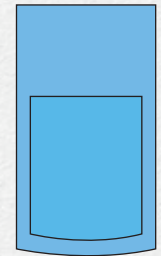

B. 1 funda para charola de mayo




C. 4 campos con tira adhesiva




D. 1 bolsa para suturas




E. 1 estoquinete impermeable

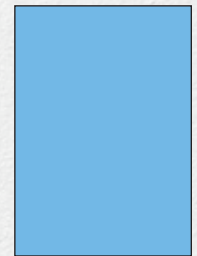

F. 1 cubierta para mesa de riñón

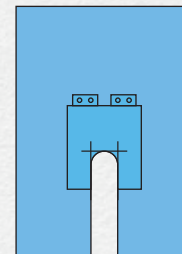

G. 1 sábana con fenestrado en "U"

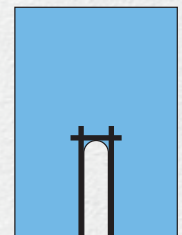

H. 1 campo en forma de "U"

Presentaciones

Código: M37G930

Pieza | Caja con 6

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Paquete para parto (estéril)


M37G49

Características:


-  Fabricado con tela SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 35 ± 1 g/m².
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Resistente a la tensión.
-  Color azul.

Composición del paquete:


- A. 1 Bata talla grande para cirujano con toalla para manos.
- B. 1 Funda para charola de mayo, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 0.58 x 1.37 m.
- C. 1 Campo para cadera, 0.80 x 0.50 m.
- D. 1 Sábana para recibir al bebé, 0.75 x 0.80 m.
- E. 2 Pierneras, 0.55 x 1.20 m.
- F. 1 Campo quirúrgico abdominal repelente, 0.80 x 1.50 m.
- G. 1 Cubierta repelente para mesa de instrumental, 1.5 x 2.0 m.

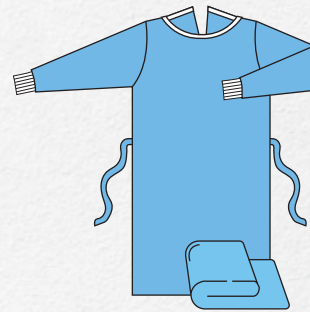


A. 1 bata para cirujano con toalla para manos

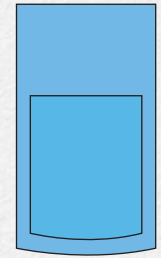


B. 1 funda para charola de mayo

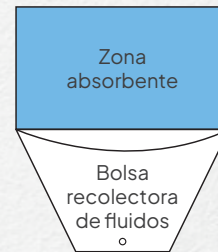


C. 1 campo para cadera

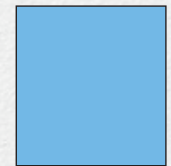


D. 1 sábana para recibir al bebé

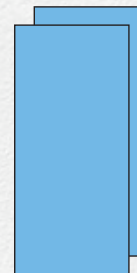

E. 2 pierneras

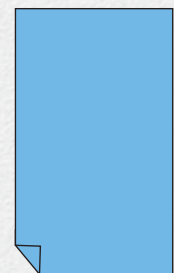

F. 1 campo abdominal repelente

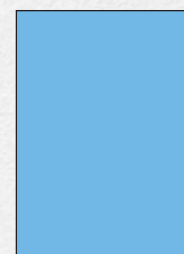

G. 1 cubierta para mesa de instrumental

Presentaciones

Código: M37G49

Pieza | Caja con 7

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase




Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Paquete para laparotomía (estéril)


M37G99

Características:

-  Fabricado con tela SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 35 ± 1 g/m².
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Resistente a la tensión.
-  Color azul.

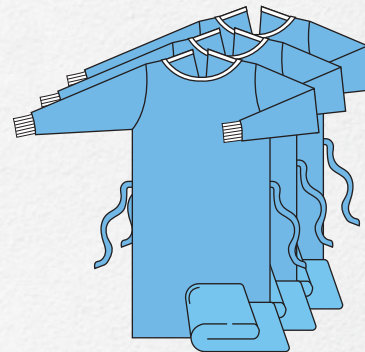

A. 3 batas para cirujano con toalla para manos

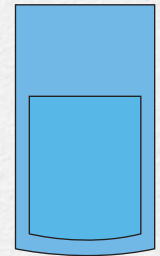


B. 1 funda para charola de mayo

Composición del paquete:


- A. 3 Batas talla grande para cirujano, con toalla para manos.
- B. 1 Funda para charola de mayo, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 0.58 x 1.37 m.
- C. 4 Campos con cinta adhesiva, 0.9 x 0.9 m.
- D. 2 Campos, 0.75 x 0.75 m.
- E. 1 sábana podálica, 1.5 X 2.0 m.
- F. 1 Cubierta impermeable para mesa de instrumental, 1.5 x 2.0 m.
- G. 1 sábana hendida de 2.0 x 2.4 m con fenestración de 0.10 x 0.30 m con cinta adhesiva y zona absorbente con porta cordones.




C. 4 campos con cinta adhesiva

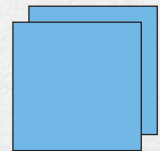


D. 2 campos

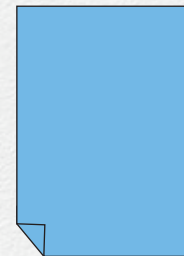

E. 1 sábana podálica

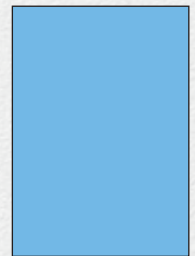

F. 1 cubierta para mesa de instrumental

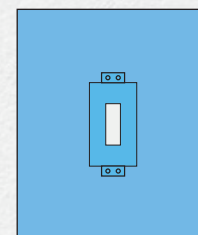

G. 1 sábana hendida

Presentaciones

Código: M37G99

Pieza | Caja con 4

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Paquete de cirugía menor pediátrico (estéril)

M37G43

Características:

-  Fabricado con tela SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 35 ± 1 g/m².
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Resistente a la tensión.
-  Color azul.


Composición del paquete:

- A. 1 Bata para instrumentista, con toalla para manos.
- B. 1 Funda para charola de mayo, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 0.58 x 1.37 m.
- C. 1 Bata talla grande para cirujano, con toalla para manos.
- D. 1 Cubierta repelente para mesa de instrumental, 1.5 x 2.0 m.
- E. 2 Campos con tira adhesiva, 0.9 x 0.9 m.
- F. 1 sábana hendida de 1.2 x 1.2 m con fenestración de 0.15 x 0.15 m con cinta adhesiva y zona absorbente con porta cordones.
- G. 1 Sábana cefálica, 1.5 x 2.0 m.
- H. 1 Sábana podálica, 1.5 x 2.0 m.


Presentaciones

Código: M37G43


Pieza | Caja con 5

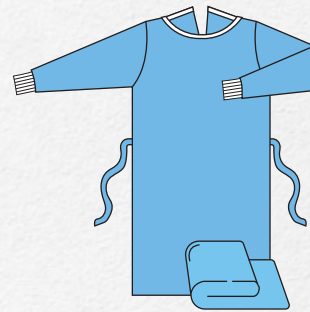


A. 1 bata para instrumentista con toalla para manos

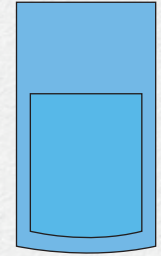

B. 1 funda para charola de mayo

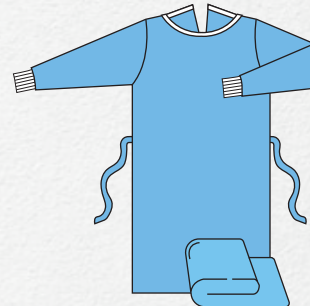


C. 1 bata para cirujano con toalla para manos

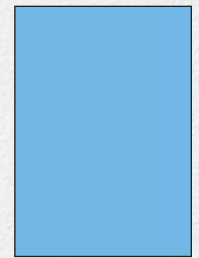


D. 1 cubierta para mesa de instrumental




E. 2 campos con tira adhesiva

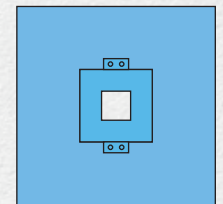

F. 1 sábana hendida

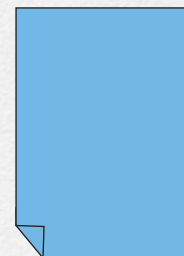

G. 1 sábana cefálica

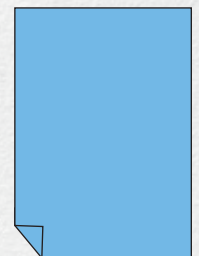

H. 1 sábana podálica

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

 **EEE México**
Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México

 (52) 55 2626 5001
 info@grupoeee.com
 www.grupoeee.com

 Especialistas en Esterilización y Envase
 Especialistas en Esterilización y Envase
 Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Equipo quirúrgico desechable universal (estéril)


M54G227

Características:

-  Fabricado con tela SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 50 ±1 g/m².
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Resistente a la tensión.
-  Color azul.


Composición del paquete:

- A. 3 Batas para cirujano talla grande, repelente y resistente a líquidos. 3 toallas para manos.
- B. 2 fundas de polietileno con refuerzo absorbente para charola de mayo, 0.58 x 1.37 m.
- C. 1 Bata para instrumentista talla mediana, repelente y resistente a líquidos, con toalla para manos.
- D. 4 Campos con tira adhesiva, 0.60 x 0.65 m.
- E. 1 Cubierta para mesa de riñón, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 1.75 x 2.6 m.
- F. 2 Sábanas laterales, 1 x 1.95 m.
- G. 1 Sábana superior, 1.30 x 2.55 m.
- H. 1 Sábana inferior, 1.50 x 2.60 m.
- I. 1 Bolsa de papel grado médico para suturas.

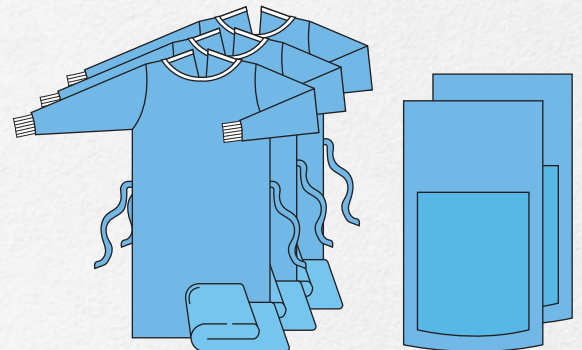


A. 3 batas para cirujano con toalla para manos

B. 2 fundas para charola de mayo

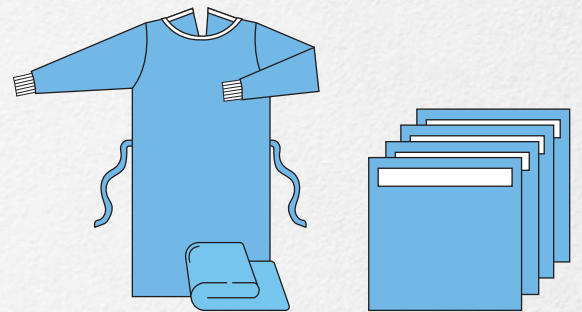

C. 1 bata para instrumentista con toalla para manos

D. 4 campos con cinta adhesiva

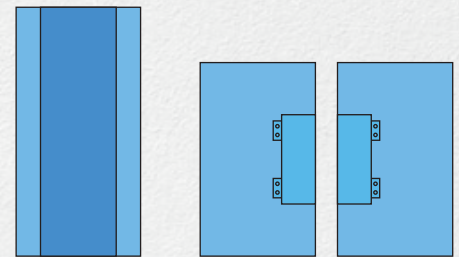


E. 1 cubierta para mesa de riñón


F. 2 sábanas laterales



I. 1 bolsa para suturas

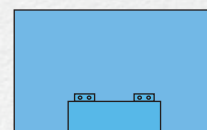

G. 1 sábana superior

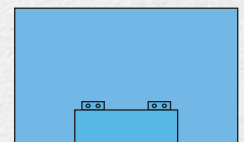

H. 1 sábana inferior

Presentaciones

Código: M54G227

Pieza | Caja con 3

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Paquete básico para cirugía (estéril)

M37G438


Clave de Cuadro Básico 060.231.0575

Características:

Los paquetes quirúrgicos de Especialistas en Esterilización y Envase están hechos de tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable.


Composición del paquete:

- A. 3 Batas quirúrgicas para cirujano, con puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, talla grande.
- B. 4 Toallas absorbentes, 40 ± 5 cm x 40 ± 5 cm.
- C. 1 Bata quirúrgica para instrumentista con puños ajustables, tamaño mediano.
- D. 4 Campos sencillos, 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm.
- E. 1 Funda para charola de mayo, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 50 ± 10 cm x 140 ± 10 cm.
- F. 1 Cubierta para mesa de riñón, 150 ± 10 cm x 240 ± 10 cm.
- G. 1 Sábana superior, 150 ± 10 cm x 190 ± 10 cm.
- H. 1 Sábana inferior, 170 ± 10 cm x 190 ± 10 cm.

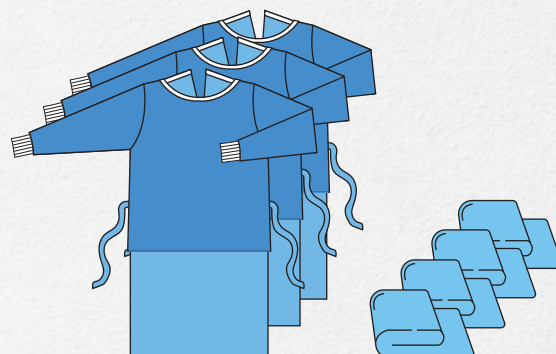


A. 3 Batas para cirujano reforzadas

B. 4 Toallas absorbentes

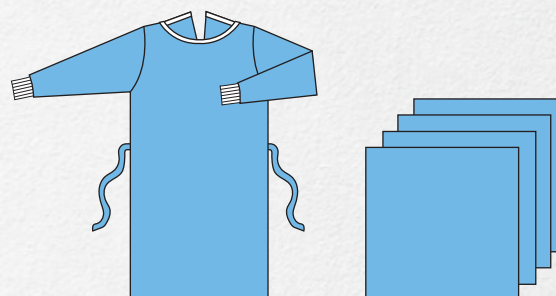


C. 1 bata para instrumentista


D. 4 campos sencillos

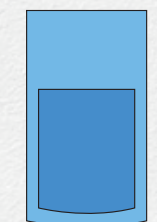


E. 1 funda para charola de mayo

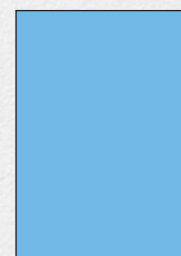

F. 1 cubierta para mesa de riñón

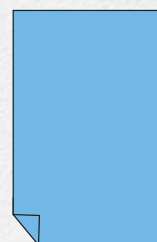

G. 1 Sábana superior

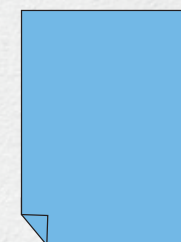

H. 1 Sábana inferior

Presentaciones

Código: M37G438

Pieza | Caja con 3

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Paquete para cesárea y cirugía general (estéril)

M37G442


Clave de Cuadro Básico 060.231.0583

Características:


Los paquetes quirúrgicos de Especialistas en Esterilización y Envase están hechos de tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable.

Composición del paquete:


- A. 3 Batas quirúrgicas para cirujano, con puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, talla grande. 3 toallas para manos.
- B. 1 Funda para charola de mayo, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 58 ± 10 cm x 137 ± 10 cm.
- C. 1 Bata quirúrgica para instrumentista con puños ajustables, talla mediana y toalla para manos.
- D. 6 Campos sencillos, 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm.
- E. 1 Sábana hendida de 180×240 cm, con fenestración de 27×27 cm con refuerzo absorbente y cintas adhesivas.
- F. 1 Cubierta para mesa de riñón, 141 ± 10 cm x 239 ± 10 cm.
- G. 1 Sábana superior, 141 ± 10 cm x 180 ± 10 cm.

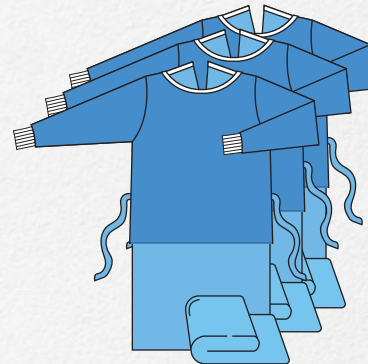


A. 3 Batas para cirujano reforzadas, con toalla para manos

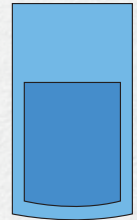


B. 1 funda para charola de mayo

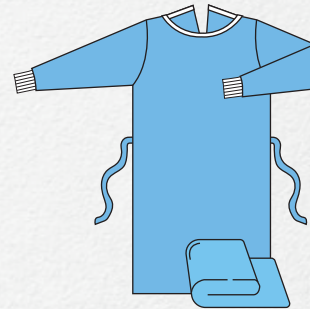


C. 1 bata para instrumentista con toalla para manos

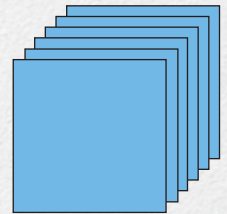


D. 6 campos sencillos

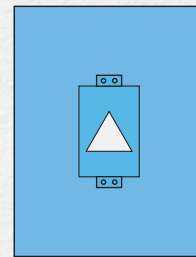

E. 1 sábana hendida

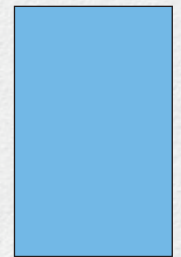

F. 1 cubierta para mesa de riñón

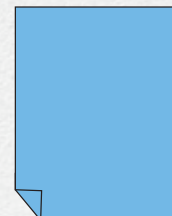

G. 1 Sábana superior

Presentaciones

Código: M37G442

Pieza | Caja con 4

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)


Paquete para parto (estéril)

M37G443


Clave de Cuadro Básico 060.231.0609

Características:

Los paquetes quirúrgicos de Especialistas en Esterilización y Envase están hechos de tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable.

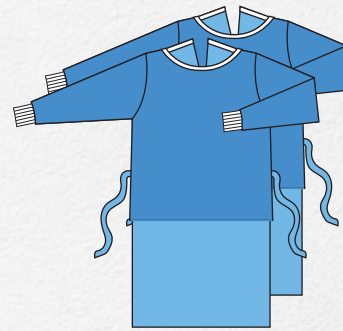

A. 2 Batas para cirujano reforzadas

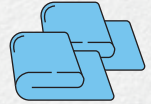


B. 2 Toallas absorbentes

Composición del paquete:

- A. 2 Batas quirúrgicas para cirujano, con puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, talla grande.
- B. 2 Toallas absorbentes, 40 ± 5 cm x 40 ± 5 cm.
- C. 4 Campos sencillos, 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm.
- D. 2 Pierneras, 100 ± 10 cm x 110 ± 10 cm.
- E. 1 Cubierta para mesa de riñón, 150 ± 10 cm x 240 ± 10 cm.



C. 4 campos sencillos

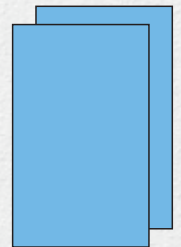


D. 2 pierneras

Presentaciones

Código: M37G443

Pieza | Caja con 6

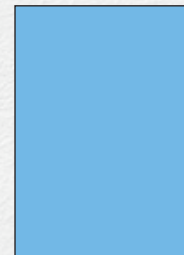

E. 1 cubierta para mesa de riñón

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

Paquete para cirugía general universal (estéril)

M37G450


Clave de Cuadro Básico 060.231.0591

Características:

Los paquetes quirúrgicos de Especialistas en Esterilización y Envase están hechos de tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable.


Composición del paquete:

- A. 3 Batas quirúrgicas para cirujano, con puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, talla grande.
- B. 4 Toallas absorbentes, 40 ± 5 cm x 40 ± 5 cm.
- C. 1 Bata quirúrgica para instrumentista, puños ajustables, talla mediana.
- D. 4 Campos sencillos, 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm.
- E. 1 Funda para charola de mayo, elaborada de polietileno con refuerzo absorbente, 50 ± 10 cm x 140 ± 10 cm.
- F. 1 Cubierta para mesa de riñón, 150 ± 10 cm x 240 ± 10 cm.
- G. 1 Sábana hendida de 180 ± 10 cm x 240 ± 10 cm con fenestración de 10×30 cm con cinta adhesiva y zona absorbente con porta cordones.
- H. 1 Sábana lateral, 130 ± 10 cm x 180 ± 10 cm.
- I. 1 Sábana superior, 150 ± 10 cm x 190 ± 10 cm.
- J. 1 Sábana inferior, 170 ± 10 cm x 190 ± 10 cm.

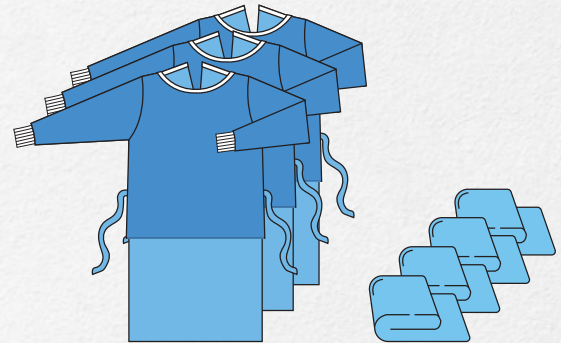


A. 3 Batas para cirujano reforzadas

B. 4 Toallas absorbentes

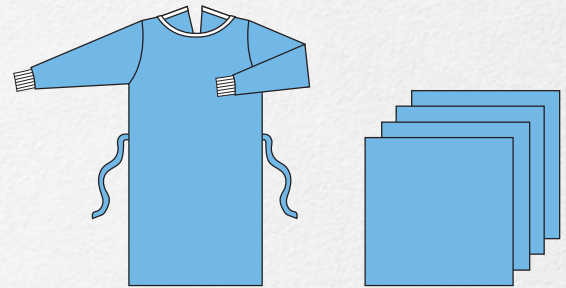

C. 1 bata para instrumentista

D. 4 campos sencillos

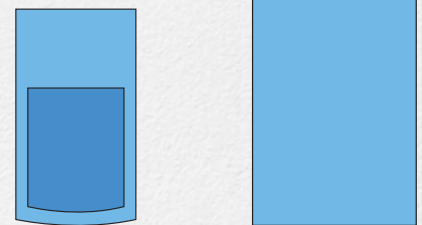


E. 1 funda para charola de mayo

F. 1 cubierta para mesa de riñón


Presentaciones

Código: M37G450


Pieza | Caja con 4

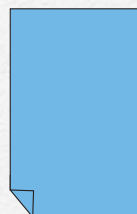

I. 1 Sábana superior

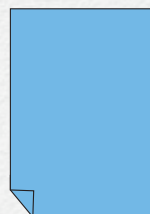

J. 1 Sábana inferior

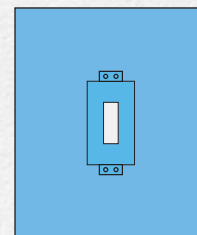

G. 1 sábana hendida



H. 1 Sábana lateral

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

Paquete de cama (no estéril)

A33G47

Características:

-  Fabricado con tela no tejida SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 30 $\pm$ 1 g/m².
-  Confección por medio de costura.
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Libre de desprendimiento de partículas.
-  Antiestática y resistente a la tensión.
-  No estéril y desechable.
-  Color blanco.


Composición del paquete:

- A. 1 Cubrecolchón, 1.37 x 2.37 m.
- B. 1 Sábana, 1.20 x 2.0 m.
- C. 1 Funda para almohada, 0.79 x 0.49 m.

Presentaciones

Código: A33G47


Paquete | Caja con 20

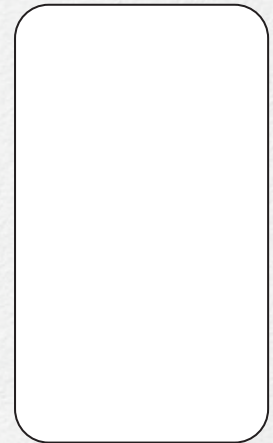

A. 1 Cubrecolchón



B. 1 Sábana

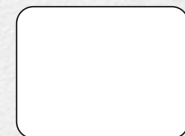

C. 1 Funda para almohada

DHIGIENEEE®


DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

Paquete para mesa de quirófano (no estéril)


A37G46

Características:

-  Fabricado con tela no tejida SMS - 100% polipropileno.
-  Gramaje de 35 ±1 g/m².
-  Confección por medio de costura.
-  Resistente a la penetración de líquidos.
-  Libre de desprendimiento de partículas.
-  Antiestática y resistente a la tensión.
-  No estéril y desechable.
-  Color azul.

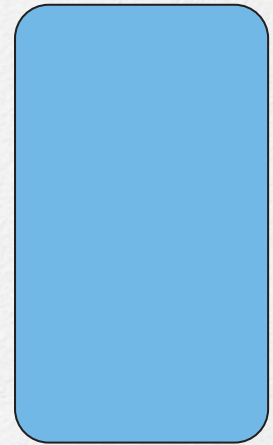

A. 1 Cubrecolchón

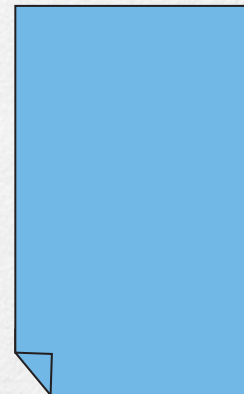

B. 1 Sábana

Composición del paquete:

- A. 1 Cubrecolchón, 1.20 x 2.24 m.
- B. 1 Sábana, 1.20 x 2.0 m.

Presentaciones

Código: A37G46

Paquete | Caja con 25

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

Campo sencillo

- Fabricado con tela no tejida.
- Material 100% polipropileno.
- Resistente a la penetración de líquidos y fluidos.
- Color antirreflejante.
- Antiestática y resistente a la tensión.
- Estéril y desechable.



Catálogo	Clave	Dimensiones	Color	Presentaciones
M37G197	N/A	90 cm x 90 cm	antirreflejante	Paquete con 2 piezas
M37G198	060.231.0617	90 cm x 90 cm	antirreflejante	Pieza

Sábanas y Fundas

Sábanas desechables

- Fabricada con tela no tejida.
- Material 100% polipropileno SMS.
- Resistente a la penetración de líquidos.
- Libre de desprendimiento de partículas.
- Antiestática y resistente a la tensión.
- No estéril y desechable.




Catálogo	Descripción	Dimensiones	Color	Presentaciones
A33F511	Sábana para colchón	2 m x 1.20 m	Blanco	Pieza
				Caja con 60 piezas
A33F311	Funda para almohada	0.76 m x 0.48 m	Blanco	Pieza
				Caja con 200 piezas

Paquetes para mortaja

De material desechable, impermeable y termograbada.

Componentes:

- Camisón, sujetador para barbilla, sujetador para manos y sujetador para tobillos.
Tela de polipropileno de 30 g/m², tela color blanco.
Sujetadores para barbilla: Cinta larga con ovalo al centro para manos
Sujetador de tobillos: Par de cintas largas.
- Bolsa de forma rectangular a prueba de fuga de líquidos en los costados.
Tela de polipropileno con película de polietileno de 96 g/m², tela color gris.
La bolsa es de forma rectangular con cierre de plástico que no permita fugas de líquidos (bolsa, cierre en las orillas de los lados, en las esquinas de la bolsa o en las uniones). Las uniones deben de ser tales que resistan el peso y las diferentes tensiones a que se somete la bolsa originadas durante la manipulación y uso de la misma.
- Tarjeta de identificación.

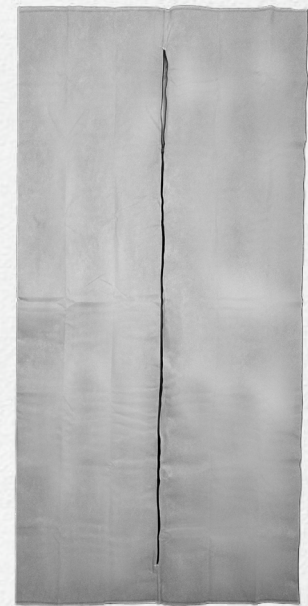

Bolsa



Camisón



Sujetador de tobillos y de barbilla



Tarjeta de identificación

Código	Tamaño	Descripción	Dimensiones de la bolsa	Piezas por caja
D78B44	Chico	Paquete	111 cm de largo por 68 cm de ancho y cierre de 94 cm	25
D78C44	Mediano	Paquete	189 cm de largo por 96 cm de ancho y cierre de 162 cm	13
D78D44	Grande	Paquete	217 cm de largo por 98 cm de ancho y cierre de 190 cm	11
D78D07	Grande	Bolsa	217 cm de largo por 98 cm de ancho y cierre de 190 cm	11

DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

"Las imágenes de los productos son de carácter ilustrativo y pueden diferir de lo mostrado en este catálogo".

Mascarilla quirúrgica de un solo uso

Mascarilla quirúrgica elaborada con dos capas externas de tela no tejida y un filtro, plano o plisado. Con ajuste nasal moldeable.

Características:

- Composición de las 3 capas: Spunbond (capa exterior, protección, 25 g, color azul), Meltblown (capa intermedia, filtro bacteriano, 25 g, color blanco) y Spunbond (capa interior, protección, 25 g, color blanco).
- Eficiencia (BFE) de 99 %.
- Resistente a fluidos.
- No Tóxico.
- Libre de látex.
- Sin fibra de vidrio.
- Antiestático.
- Hipoalergénico.
- Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza o retroauricular.
- Excelente transpirabilidad
- Cómodo.
- Desechable.



Mascarilla quirúrgica de un sólo uso de Especialistas en Esterilización y Envase está destinado a proteger al paciente de agentes infecciosos y, además, en determinadas circunstancias para proteger al usuario contra salpicaduras de líquidos y partículas potencialmente contaminados. También puede estar destinado a ser usado por pacientes y otras personas para reducir el riesgo de propagación de infecciones, especialmente en situaciones epidémicas o pandémicas.

Catálogo	Color	Presentación
A31D91	Azul	Caja con 50 piezas
A31D91BL	Blanco	Caja con 50 piezas
A31D91FL	Con impresión de flores	Caja con 50 piezas



DHIGIENEEE®

DHIGIENEEE® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

"Las imágenes de los productos son de carácter ilustrativo y pueden diferir de lo mostrado en este catálogo".



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
Fracc. Industrial Las Armas,
Tlalnepantla de Baz, 54080,
Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase




Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

Guantes de látex no estériles para exploración

Características:

- Desechable.
- Ambidiestro.
- Poco talco.
- Fácil ajuste.

Catálogo	Tamaño	Unidades por caja
GDE001	Extra chico	100
GDE002	Chico	100
GDE003	Mediano	100
GDE004	Grande	100

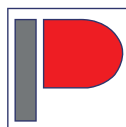

Rubbercare Protection Products Sdn Bhd
Formerly Known as Perusahaan Pelindung Getah (M) Sdn Bhd

Guantes de nitrilo no estériles para exploración

Características:

- Guante de Nitrilo, ambidiestro, de un solo uso.
- 100% nitrilo, co-polímero sintético.
- Libre de polvo.



- De textura táctil, la cual proporciona una excelente sensibilidad y excelente agarre.
- Contienen una alta calidad, para proporcionar la máxima barrera de protección.
- Excelente confort y exacta sensibilidad.
- Ribete con refuerzo agregado y de fácil colocación.
- 3 veces más resistente al de caucho natural o guantes de vinilo, esto es garantía de que los guantes no se desgarran con facilidad.
- Libre de LÁTEX / proteína libre.
- Resistencia química a una amplia gama de productos químicos.

Catálogo	Tamaño	Ancho (mm)	Presentación
3000007090	Chico	75 +/- 5	Caja 100
3000007091	Mediano	85 +/- 5	Caja 100
3000007092	Grande	95 +/- 5	Caja 100

Tapete adhesivo

Antimicrobiano

TACK MAT®

La superficie del tapete contiene un adhesivo firme con antimicrobiano que atrapa la suciedad y partículas de polvo por el tráfico de pies y ruedas de equipo, reduciendo la contaminación antes de entrar a cada una de las áreas médicas.

Los tapetes adhesivos antimicrobianos de Especialistas en Esterilización y Envase, reducen la contaminación de lo que entra a un área controlada.

- Seguridad y limpieza en cada una de las áreas médicas, ya sea en, quirófanos, central de equipos y esterilización, cuarto de aislamiento, salas de transferencia, entradas principales, áreas de preparación de alimentos, áreas de fabricación de fármacos, dispositivos médicos o alimentos.
- Fácil de usar removiendo la hoja sucia, en un instante se expone una hoja nueva de manera rápida y práctica, el cambio también le indica cuantas láminas aún hay disponibles.



Catálogo	Tamaño	Color	Hojas	Piezas por caja
TACK12012	18" x 46"	Azul	20 hojas	1
TACK12042				4
TACK12052				5
TACK12062				6
TACK12082				8

Catálogo	Tamaño	Color	Hojas	Piezas por caja
TACK13012	18" x 46"	Azul	30 hojas	1
TACK13042				4
TACK13052				5
TACK13062				6
TACK13082				8

Catálogo	Tamaño	Color	Hojas	Piezas por caja
TACK13014	36" x 46"	Azul	30 hojas	1
TACK13044				4
TACK13054				5
TACK13064				6
TACK13084				8

Catálogo	Tamaño	Color	Hojas	Piezas por caja
TACK22012	18" x 46"	Blanco	20 hojas	1
TACK22042				4
TACK22052				5
TACK22062				6
TACK22082				8



TACK MAT® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

Catálogo	Tamaño	Color	Hojas	Piezas por caja
TACK23012	18" x 46"	Blanco	30 hojas	1
TACK23042				4
TACK23052				5
TACK23062				6
TACK23082				8

Catálogo	Tamaño	Color	Hojas	Piezas por caja
TACK23013	25" x 45"	Blanco	30 hojas	1
TACK23043				4
TACK23053				5
TACK23063				6
TACK23083				8


Catálogo	Tamaño	Color	Hojas	Piezas por caja
TACK36011	24" x 30"	Gris	60 hojas	1
TACK36041				4
TACK36051				5
TACK36061				6
TACK36081				8

Catálogo	Tamaño	Color	Hojas	Piezas por caja
TACK32012	18" x 46"	Gris	20 hojas	1
TACK32042				4
TACK32052				5
TACK32062				6
TACK32082				8

Catálogo	Tamaño	Color	Hojas	Piezas por caja
TACK33012	18" x 46"	Gris	30 hojas	1
TACK33042				4
TACK33052				5
TACK33062				6
TACK33082				8

Catálogo	Tamaño	Color	Hojas	Piezas por caja
TACK33014	36" x 46"	Gris	30 hojas	1
TACK33044				4
TACK33054				5
TACK33064				6
TACK33084				8

Características:

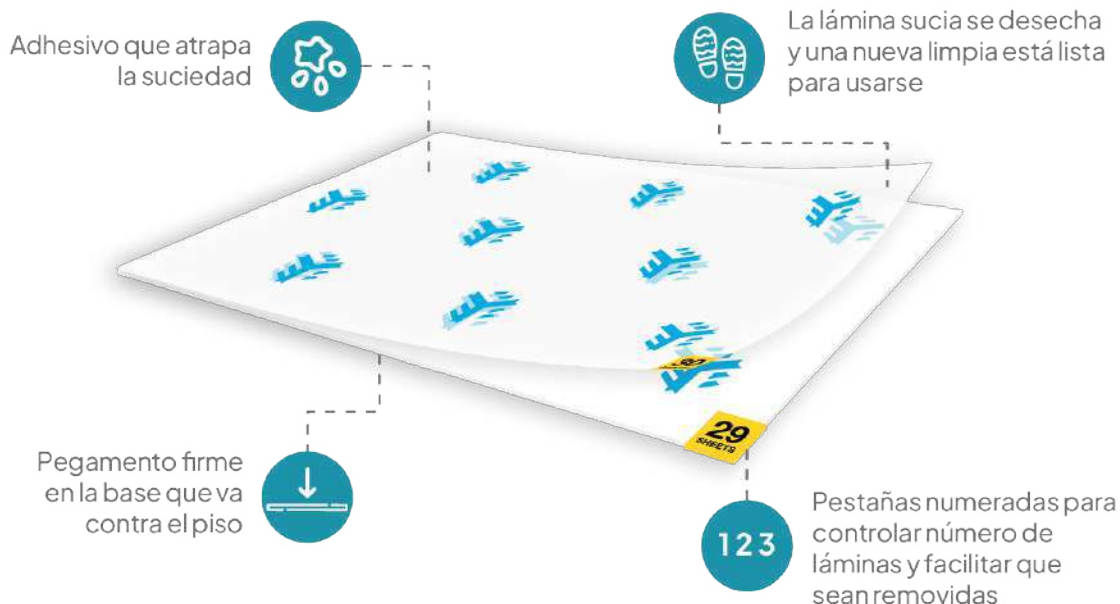

Seguridad y limpieza en:

Quirófanos
 Central de Equipos y Esterilización
 Cuarto de aislamiento
 Salas de transferencia
 Entradas principales
 Áreas de preparación de alimentos
 Áreas de fabricación de fármacos, dispositivos médicos o alimentos



TACK MAT® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase

HUMIPAK®

BOLSA DE RETENCIÓN DE HUMEDAD

HUMIPAK® tiene como objetivo reducir las infecciones asociadas a la atención sanitaria (HCAI) manteniendo los instrumentos en condiciones húmedas que mantienen la suciedad en un estado blando, facilitando, los procesos de limpieza y descontaminación más rápidos sin productos químicos de pretratamiento.




BENEFICIOS




- Contención segura de material biopeligroso.
- Mantiene los instrumentos húmedos hasta por 7 días.
- No requiere químicos de pretratamiento.
- Transporte seguro dentro y fuera del hospital.
- Reduce el tiempo de limpieza hasta un 70%.
- Disminuye costos de reprocesamiento.
- Reduce el desgaste de instrumentos delicados.
- Menor impacto ambiental.

HUMIPAK® CÓMO FUNCIONA

Ayuda a evitar el secado de proteínas. La capa absorbente genera niveles estables de humedad, manteniendo el contenido húmedo hasta por 7 días.

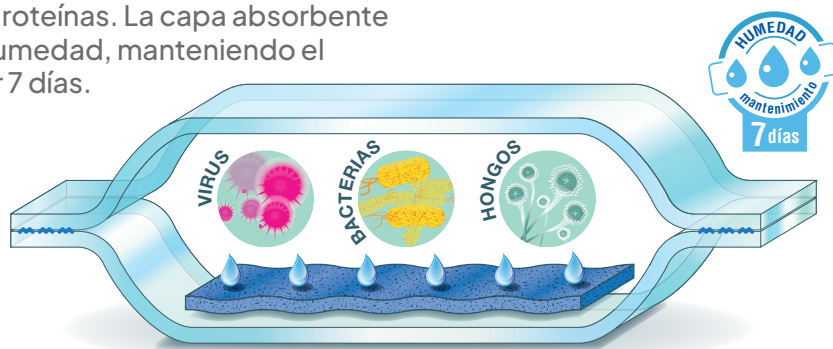


INSTRUCCIONES DE USO

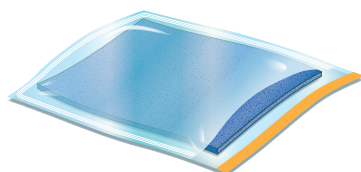

PASO #1:

Seleccione el tamaño de la bolsa

Elija entre nuestra gama de tamaños para instrumentos pequeños, cestas DIN, endoscopios y brazos robóticos. Situar el instrumento sobre la bolsa como guía para saber qué tamaño usar.

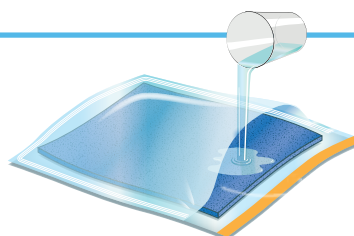

PASO #2:

Agregue agua a la bolsa


Este es el paso más importante. No agregue más de la cantidad de agua recomendada a la bolsa.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con películas de poliéster/ Polipropileno con un revestimiento interior de viscosa azul altamente hidrófilo.
 - Cierre de la bolsa logrado con cinta autoadhesiva sensible a la presión.
 - Materiales de grado médico.
- Logotipo, instrucciones de uso, número de lote, detalles de Westfield y símbolo de riesgo biológico impresos en la bolsa.




Código	Descripción	Tamaño (mm)	Cantidad del paquete
HPSSR01	Brazo robótico único	210 x 815	100
HPSSR02	Robótico 2 brazos	240 x 815	100
HPSSR04	Robótico 4 brazos	420 x 815	100
HPSSR05	Robótico 5 brazos	510 x 815	100
HPSS5667	Endoscopias	560 x 670	100
HPSS2035	Bandeja pequeña	200 x 350	100
HPSS4243	Medio DIN	420 x 430	100
HPSS4267	DIN completo	420 x 670	100
HPSS6577	Doble DIN	650 x 770	50

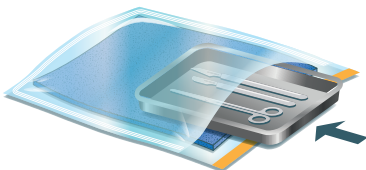

PASO #3:
Coloque los artículos en la bolsa

Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del artículo para que el sello se cierre correctamente.
La zona de sellado debe quedar plana.

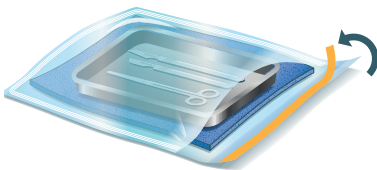

PASO #4:
Selle la bolsa

Retire la tira amarilla y selle suavemente la bolsa de un extremo a otro.



ESPUMA DETERGENTE-DESINFECTANTE PARA INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO

Aniosyme Prime

PRETRATAMIENTO DETERGENTE Y DESINFECTANTE EN ESPUMA DEL INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO

- Formulación que combina dos conceptos de eficacia patentada
- Evita el secado de la suciedad
- Efecto antimicrobiano desde los 15 minutos
- Espuma densa: permite la alta cobertura del instrumental
- Amplia compatibilidad



Aniosyme Prime


Pretratamiento detergente y desinfectante en espuma del instrumental médico y quirúrgico

ÁREAS DE USO


Espuma detergente desinfectante de pretratamiento lista para usar. Indicado para una disolución optimizada de la contaminación del instrumental con tiempos de reposo más largos (hasta 72 horas) o antes del procesamiento automático.

Evita el secado de la contaminación y facilita la limpieza previa gracias a un buen efecto de limpieza. La densidad de la espuma garantiza una cobertura uniforme de la superficie del instrumental. Aniosyme Prime es compatible con una amplia variedad de materiales. No apto para instrumental de zinc o hierro.


INSTRUCCIONES DE USO

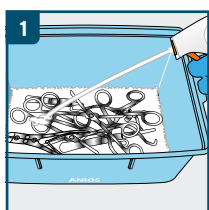


Rociar el fondo de la bandeja de remojo con Aniosyme Prime y colocar el instrumental contaminado.

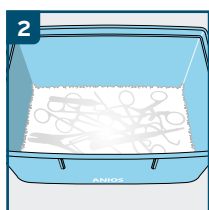

Volver a cubrir todo el instrumental con espuma. Tiempo mínimo de contacto: 15 minutos. Para actividad tuberculicida, dejar un tiempo de contacto de 30 minutos.

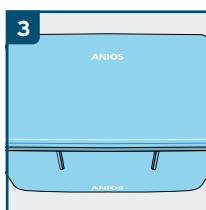

Cubrir la bandeja con una tapa.

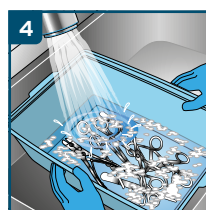

Enjuagar minuciosamente el instrumental tratado con agua del grifo para eliminar todos los restos de producto y suciedad orgánica antes de proceder con la limpieza a máquina o manual.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

CONDICIONES	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida Según EN 13727 y EN 14561, condiciones sucias	15 min
Levaduricida Según EN 13624 y EN 14562, condiciones sucias	15 min
Tuberculicida Según EN 14348 y EN 14563, condiciones sucias	30 min
Micobactericida Según EN 14348 y EN 14563, condiciones sucias	60 min
Actividad frente a virus envueltos: Según EN 14476/EN 17111, condiciones sucias	15 min

INFORMACIÓN DE PEDIDO Y EMBALAJE

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Aniosyme Prime	12 x Envases de 750ml	3133002



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.
Avinguda del Baix Llobregat n.ºs. 3-5
Sant Joan Despí-08970

ÁREA DE APLICACIÓN

Pretratamiento del instrumental quirúrgico en espuma: durante el transporte en seco o durante el almacenamiento del instrumental sucio antes del lavado a máquina o manual. Mantiene un nivel de humedad adecuado para evitar que la sangre y otros materiales orgánicos se sequen.

INSTRUCCIONES DE USO

Producto listo para usar.

1. Rociar el fondo de la bandeja de remojo con Aniosyme Prime y colocar el instrumental contaminado.
2. Volver a cubrir todos el instrumental con espuma. Tiempo mínimo de contacto: 15 minutos. Para actividad tuberculicida, dejar un tiempo de contacto de 30 minutos.
3. Cubrir la bandeja con una tapa.
4. Enjuagar minuciosamente el instrumental tratado con agua del grifo para eliminar todos los restos de producto y suciedad orgánica antes de proceder con la limpieza a máquina o manual.

No utilizar en instrumental de zinc o hierro.

INGREDIENTES

Carbonato de amonio cuaternario, surfactantes no iónicos, complejo enzimático (proteasa, lipasa y amilasa), agentes secuestrantes, excipientes.

ALMACENADO

Peligro. Respetar las precauciones de uso (elaboradas según las normas Europeas de clasificación y etiquetado de los productos químicos). Almacenar entre +5°C y +25°C.

CERTIFICADOS

Producto sanitario. La actividad antimicrobiana completa del producto se recoge en el dossier de producto disponible bajo petición.

PRODUCTO SANITARIO. USAR CON SEGURIDAD

Por favor lea la etiqueta y la información de producto.



PARA USO PROFESIONAL.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™

DESCUBRA **NUEVAS SINÉRGICAS** CON NUESTRO DETERGENTE PENTAENZIMÁTICO

Aniosyme Synergy 5

ÚNICO DETERGENTE CON 5 ENZIMAS PARA EL REPROCESADO MANUAL Y AUTOMÁTICO DEL INSTRUMENTAL

Aniosyme Synergy 5 es el primer detergente con 5 enzimas para múltiples aplicaciones. Proporciona unos excelentes resultados de limpieza manual y automática.

Aniosyme Synergy 5:

- **ÚNICO** - Detergente con 5 enzimas de amplio espectro de actuación
- **EFFECTIVO** - Eficaz desde los 5 minutos en desinfectadoras y con cualquier calidad de agua
- **SINÉRGICO** - Primer producto para el reprocesado manual y automatico en centrales de esterilización



Aniosyme Synergy 5

Único detergente con 5 enzimas para el reprocesado manual y automático del instrumental.



Aniosyme Synergy 5
Envase de 5 L
Referencia: 2235.038



Aniosyme Synergy 5
Envase de 5 L
Referencia: 2235.015

POTENTE

Eficacia demostrada a partir de los 5 minutos. Excelente compatibilidad con el material.

ENZIMÁTICO

Elimina todo tipo de residuos gracias a su especial formula pentaenzimática.

EFFECTIVIDAD

Eficacia demostrada en concentraciones de uso muy bajas 0,1% al 0,5%.

Densidad	20 °C	1,10 g / ml
pH value* (concentrado)	20 °C	7,89
pH area* (en solución 1 - 5 ml/l)	20 °C	6,89 - 7,29
Conductividad (solución, 1 - 5 ml/l en agua)	20 °C	0,08 - 0,33 mS / cm

Mediciones del valor de pH en condiciones de funcionamiento siempre por medio de un medidor de pH con compensación de temperatura.

UNIFORMACIÓN PARA PEDIDOS

UTILIZAR PARA INMERSIÓN Y ULTRASONIDOS	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Aniosyme Synergy 5	12 x Envases de 1 L	2235.095
Aniosyme Synergy 5	4 x Envases de 5 L + válvula de 25 ml	2235.036

PARA UTILIZAR EN MAQUINA	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Aniosyme Synergy 5	2 x Envases de 5 L	2235.038
Aniosyme Synergy 5	2 x Envases de 5 L	2235.015
Aniosyme Synergy 5	1 x Envase de 10 L	2235.024
Aniosyme Synergy 5	1 x Envase de 25 L	2235.018
Aniosyme Synergy 5	200 L Drum	2235.005



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France



PARA USO PROFESIONAL.

ÁREA DE APLICACIÓN

Detergente pentaenzimático para el instrumental. Limpieza del instrumental quirúrgico y equipamiento médico, endoscopios y productos sanitarios, por inmersión, baños de ultrasonidos, máquinas automáticas y túneles de limpieza.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso en limpieza manual

- Solución concentrada para uso profesional.
- Utilizar a una dilución del 0,5% al 2%.
- Efectivo a partir de los 5 minutos.
- Adaptar la concentración, el tiempo de contacto y la temperatura del agua de dilución acorde al grado de suciedad. Cepillar el instrumental si es necesario. Enjuagar cuidadosamente.
- Temperatura máxima: 35°C.

Uso automático

- Solución concentrada para uso profesional.
- Utilizar a una dilución del 0,1% al 0,5%.
- Efectivo a partir de los 5 minutos.
- Adaptar la concentración, tiempo de contacto y la temperatura del agua de dilución acorde al grado de suciedad. Enjuagar cuidadosamente.
- Temperatura máxima: 60°C.

COMPOSICIÓN

Tensioactivos no iónico y catiónico, agente secuestrante, agente estabilizante, complejo enzimático, excipientes.

ALMACENAMIENTO

Peligroso - respetar las precauciones de uso (elaborado de acuerdo con las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenamiento: + 5°C a + 25°C.

CERTIFICADOS

Bajo demanda.

PRODUCTO SANITARIO, USAR CON PRECAUCIÓN

Por favor, lea la etiqueta del producto para más información.



DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Aniosyme X3

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO Y EQUIPAMIENTO DE ENDOSCOPIA PREVIO A LA ESTERILIZACIÓN

- Fórmula patentada
- Eficacia antimicrobiana optimizada desde los 5 minutos
- No corrosivo con los materiales




Aniosyme X3

Limpieza y desinfección de instrumental médico-quirúrgico y equipamiento de endoscopia previo a la esterilización


CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Complejo trienzimático
- Eficacia probada mediante DCP (*Degreasing Cleaning Power- Poder de Limpieza Desengrasante)
- pH neutro: compatible con aleaciones
- Ausencia de cloro: sin efecto corrosivo sobre los materiales
- Compatible con proceso de ultrasonidos
- Líquido azul claro
- pH en dilución (0,5%): con agua corriente: aproximadamente 7,5


INSTRUCCIONES DE USO

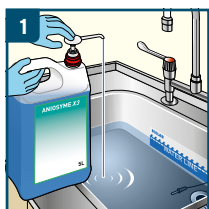


Solución concentrada de uso profesional. Utilizar mediante inmersión a una dilución adecuada respetando el tiempo de contacto.

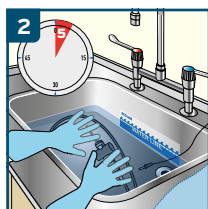

Sumerja totalmente el producto sanitario. Utilice un cepillo si lo cree necesario.

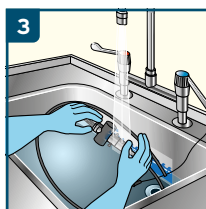

Aclare abundantemente el producto sanitario en agua del grifo y elimine así todos los residuos orgánicos del instrumental.

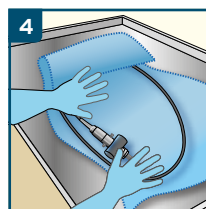

Reemplace la solución tan pronto como esté visiblemente sucia y al menos una vez al día para mantener la efectividad del producto.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

CONDICIONES	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida - Acorde con EN 13727 y EN 14561, en condiciones sucias	0,5%	5 min
Levaduricida - Acorde con EN 13624 y EN 14562, en condiciones sucias	0,5%	5 min
Eficacia frente a virus envueltos acorde con EN 14476/EN 17111, condiciones sucias	0,5%	7 min

EMBALAJE Y INFORMACIÓN DE PEDIDOS

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Aniosyme X3	12 x Envase de 1 L	3119820
Aniosyme X3	4 x Envases de 5 L con válvula de 25 ml	3119840



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.
Avinguda del Baix Llobregat n°s. 3-5
Sant Joan Despí-08970

ÁREA DE APLICACIÓN

Limpieza y desinfección de instrumental médico-quirúrgico y equipamiento de endoscopia previo a la esterilización.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada de uso profesional. Utilizar mediante inmersión a una dilución adecuada respetando el tiempo de contacto. Sumergir totalmente el producto sanitario. Cepillar si se observa suciedad visible. Aclarar abundantemente con agua para eliminar todos los residuos. Reemplace la solución tan pronto como esté visiblemente sucia y al menos una vez al día para mantener la efectividad del producto.

COMPOSICIÓN

Amonios cuaternarios, digluconato de clorhexidina, surfactantes no iónicos, complejo enzimático (proteasa, lipasa y amilasa), perfume, colorante y excipientes.

ALMACENAMIENTO

Peligroso- respetar las precauciones de uso (elaborado de acuerdo con las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenar de 5°C a 25°C.

CERTIFICADOS

Producto sanitario. La actividad antimicrobiana completa se encuentra incluida en el dossier técnico de producto disponible bajo demanda.

PRODUCTO SANITARIO. UTILIZAR CON PRECAUCIÓN

Por favor lea el etiquetado del producto para más información.



PARA USO PROFESIONAL.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™

DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL

ANIOXYDE 1000 y BANDELETES ANIOXYDE 1000 (TIRAS REACTIVAS ANIOXYDE 1000)

DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA PRODUCTOS SANITARIOS: EQUIPAMIENTO MÉDICO Y QUIRÚRGICO Y EQUIPAMIENTO ENDOSCÓPICO TERMOSENSIBLE

- Fórmula patentada
- Primer desinfectante de alto nivel con sistema PHERA, activo frente esporas y bacterias
- Producción extemporánea de ácido peracético
- Alternativa al glutaraldehído
- Libre de aldehídos: no produce fijación de las proteínas
- Posible control de la actividad de solución con tiras reactivas
- Efectividad total en 5 minutos




ANIOXYDE 1000

Desinfectante de alto nivel para productos sanitarios: equipamiento médico y quirúrgico y equipamiento endoscópico termosensible


CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Fácil de usar: activador integrado en el envase
- Eficacia probada a una concentración de ácido peracético de 900ppm
- Utilizar el baño durante 14 días máximo. Revisar la conformidad de la solución con tiras reactivas
- Compatible con cualquier producto predesinfectante con pH neutro
- Puede usarse en presencia de un sistema de succión de vapor
- Amplia compatibilidad con materiales, tanques y mesa de trabajo
- Presencia de agentes anticorrosivos que protegen de la corrosión al instrumental
- La solución desinfectante contiene de 1500ppm (después de la activación) a 900ppm de ácido peracético (concentración límite detectada por las tiras)


INSTRUCCIONES DE USO

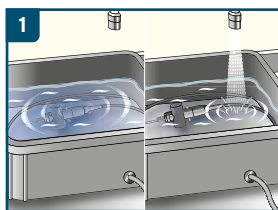


Paso pre-desinfectante: Limpiar el instrumental con detergente o un producto pre-desinfectante. Aclarar abundantemente. Para endoscopios: cepillar los canales.

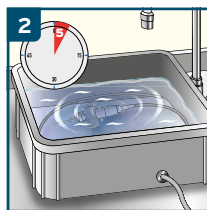

Paso desinfectante: Verter la solución activada (ver protocolo de activación en la etiqueta/protocolo). Respetar el tiempo de contacto. Para endoscopios: hacer circular la solución a través de los canales. No añadir ningún otro producto.

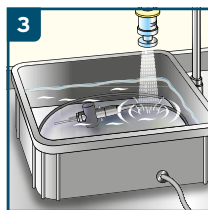

Aclarar abundantemente con agua estéril o filtrada (0,2µm) para eliminar cualquier traza de producto. Para endoscopios: aclarar interna y externamente el endoscopio.

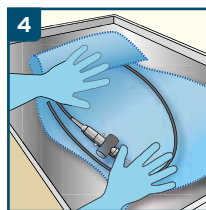

Secar con un paño estéril. Mantener el producto sanitario lo más asépticamente posible.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

CONDICIONES	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida - Según EN 13727/EN 14561, condiciones limpias	5 min
Levaduricida - Según EN 13624/EN 14562, condiciones limpias	5 min
Tuberculicida - Según EN 14348/EN 14563, condiciones limpias	5 min
Fungicida - Según EN 13624/EN 14562, condiciones limpias	5 min
Micobactericida - Según EN 14348/EN 14563, condiciones limpias	5 min
Virucida - Según EN 14476/EN 17111, condiciones limpias	5 min
Adenovirus - Según EN 14476/EN 17111, condiciones limpias	5 min
Norovirus - Según EN 14476/EN 17111, condiciones limpias	5 min
Esporicida - B. Subtilis / C. Difficile: Según EN 17126, condiciones limpias	5 min

INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	PRESENTACIONES	REFERENCIA
Anioxyde 1000 5 L	4 x Envases de 5 L (con activador integrado)	3133222
Anioxyde 1000 tiras reactivas	Envase de 50 tiras	3134054
Anioxyde 1000 1 L	12 x Envases de 1 L (con activador integrado)	3133182

ÁREA DE APLICACIÓN

Desinfectante de alto nivel para productos sanitarios: equipamiento médico y quirúrgico y equipamiento endoscópico termosensible.

INGREDIENTES

Producción extemporánea de ácido peracético a partir de acetilcaprolactama (Sistema PHERA), el generador Anioxyde 1000 contiene el 3% de peróxido de hidrógeno.

INSTRUCCIONES DE USO

Para su uso profesional. Listo para usar una vez activado.

Para envases de 5 L: verter todo el contenido del activador (botella de 41,6ml) en el generador (envase de 5 L) y posteriormente mezclar la solución y verter en una cubeta.

Para envases de 1 L: verter todo el contenido del activador (botella de 8,9 ml) en el generador (envase de 1 L) y posteriormente mezclar la solución y verter en una cubeta.

Antes del primer uso, esperar durante 30 minutos (tiempo requerido para la activación del producto). Limpiar cuidadosamente el instrumental antes de sumergirlo en la solución activada de Anioxyde 1000.

Revisar el nivel de ácido peracético con las tiras reactivas de Anioxyde 1000 antes de realizar la desinfección y al empezar después de una interrupción y cada 4 horas de actividad consecutiva. Utilizar el baño durante 14 días máximo.

- Paso pre-desinfectante:** Limpiar el instrumental con detergente o un producto pre-desinfectante. Aclarar abundantemente. Para endoscopios: cepillar los canales.
- Paso desinfectante:** Verter la solución activada (ver protocolo de activación en la etiqueta/protocolo). Respetar el tiempo de contacto. Para endoscopios: hacer circular la solución a través de los canales. No añadir ningún otro producto.
- Aclarar abundantemente** con agua estéril o filtrada (0,2µm) para eliminar cualquier traza de producto. Para endoscopios: aclarar interna y externamente el endoscopio.
- Secar con un paño estéril.** Mantener el producto sanitario lo más asépticamente posible.

ALMACENADO

Peligro. Respete las precauciones de uso. Almacenar de 5°C a 25°C en posición vertical.

CERTIFICADOS

Producto sanitario la eficacia antimicrobiana completa se encuentra recogida en el dossier de producto disponible bajo petición.

PRODUCTO SANITARIO. USAR CON PRECAUCIÓN

Por favor lea la etiqueta y la información de producto.

BANDELETTES ANIOXYDE 1000 (TIRAS REACTIVAS ANIOXYDE 1000)

INDICACIONES

Tiras reactivas para el control de la concentración de ácido peracético en solución de Anioxyde 1000 para garantizar su eficacia desinfectante.

INSTRUCCIONES DE USO

- Introducir la parte reactiva de la tira de control en su totalidad dentro de la solución durante 1 segundo
- Sacudir rápidamente y ligeramente la tira para eliminar el exceso de solución
- Lectura tras 10 segundos
Negro uniforme en todo el rango de reacción: CONFORME
Coloración no uniforme, presencia de puntos blancos, evanescencia rápida del color: NO CONFORME
- No interpretar un resultado obtenido en más de 15 segundos tras la inmersión
- Para la frecuencia de uso, consulte las instrucciones de la etiqueta de ANIOXYDE 1000

ALMACENAMIENTO

Volver a cerrar el tubo tras haber sacado una tira. Conservar protegido de la humedad. Respetar la fecha límite de uso indicada en la etiqueta. Conservar 90 días tras su apertura. Almacenar entre 5°C y 25°C.


PRECAUCIONES DE USO

Eliminar el producto y su recipiente tomando todas las precauciones de uso. Uso exclusivo profesional.

LECTURA TRAS 10 SEGUNDOS:

Conforme

Negro uniforme en todo el rango de reacción

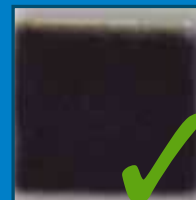

No Conforme

Coloración no uniforme, presencia de puntos blancos, evanescencia rápida del color





DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL LISTO PARA USAR

Opaster'Anios

DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA PRODUCTOS SANITARIOS

- Solución lista para usar
- Amplio espectro antimicrobiano
- Control de la conformidad del baño mediante una tira reactiva específica
- Estabilidad del baño de inmersión: 14 días




Opaster'Anios

Desinfectante de alto nivel para productos sanitarios


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Solución azul límpida
- Activo contra Clostridium difficile
- Solución de orto-ftaldehído al 0,55% tamponada a un pH de 7
- Amplia compatibilidad con todo tipo de materiales


INSTRUCCIONES DE USO

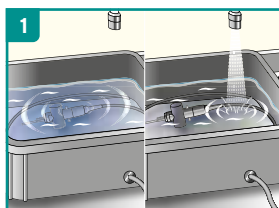


Fase de predesinfección: Limpiar el producto sanitario con un detergente o un producto predesinfectante. Enjuagar abundantemente. Para el material de endoscopia: cepillar los canales.

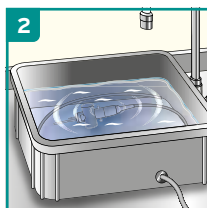

Fase de desinfección: Vierta la solución. Respetar un tiempo de contacto mínimo de 5 minutos. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. Para el material de endoscopia: recircular la solución por el interior de los canales. No añadir ningún producto en el OPASTER'ANIOS.

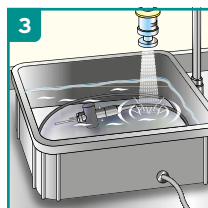

Enjuague abundantemente con agua estéril o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier resto de producto. Para el material de endoscopia: las partes internas y externas del producto sanitario.

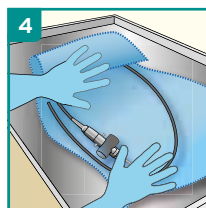

Secar con una toallita de uso único. Mantener el producto sanitario lo más aséptico posible para reutilizarlo. Para garantizar la eficacia del desinfectante.

Compruebe el nivel de orto-ftaldehído con una tira de prueba de OPASTER'ANIOS al inicio de la sesión, al recomenzar después de una interrupción y por lo menos una vez al día. Conservación máxima en el baño de inmersión: 14 días.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Afirmación/condiciones	Tiempo de contacto
Bactericida* según EN 13727/EN 14561	5 min
Levuricida* según EN 13624/EN 14562	5 min
Fungicida* según EN 13624/EN 14562	5 min
Tuberculicida* según EN 14348/EN 14563	5 min
Micobactericida* según EN 14348/EN 14563	5 min
Activo en virus encapsulados* según EN 14476/EN 17111	5 min
Virucida* según EN 14476/EN 17111	5 min
Esporicida* según EN 17126	30 min

*=condiciones de limpieza

INFORMACIÓN DE EMBALAJE Y PEDIDOS

Producto	Unidad de embalaje	Referencia
Opaster'Anios	4 x Envases de 5 L	2504.028
Opaster'Anios	Tiras reactivas (caja de 50)	100.110



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

ECOLAB®

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company



PARA USO PROFESIONAL.

ÁREA DE APLICACIÓN

Desinfectante de alto nivel para productos sanitarios: material quirúrgico y médico, material de endoscopia y material termosensible.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución lista para usar. No diluir. Limpiar y enjuagar minuciosamente el producto sanitario antes de sumergirlo en OPASTER'ANIOS.

- Fase de predesinfección:** Limpiar el producto sanitario con un detergente o un producto predesinfectante. Enjuagar abundantemente. Para el material de endoscopia: cepillar los canales.
- Fase de desinfección:** Vierta la solución. Respetar un tiempo de contacto mínimo de 5 minutos. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. Para el material de endoscopia: recircular la solución por el interior de los canales. No añadir ningún producto en el OPASTER'ANIOS.
- Enjuague abundante** con agua estéril o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier resto de producto. Para el material de endoscopia: las partes internas y externas del producto sanitario.
- Secar** con una toallita de uso único. Mantener el producto sanitario lo más aséptico posible para reutilizarlo. Para garantizar la eficacia del desinfectante.

Compruebe el nivel de orto-ftaldehído con una tira de prueba de OPASTER'ANIOS al inicio de la sesión, al recomenzar después de una interrupción y por lo menos una vez al día. Conservación máxima en el baño de inmersión: 14 días.

COMPOSICIÓN

Solución de orto-ftaldehído (0,55%) en medio regulado, colorante, perfume.

ALMACENAMIENTO

Peligroso: respete las precauciones de uso (redactadas según la normativa europea vigente en materia de clasificación y etiquetado de químicos). Almacenamiento: entre +5°C y +25°C.

CERTIFICACIÓN

Dispositivo médico. La actividad antimicrobiana completa de Opaster'Anios se incluye en el expediente científico, disponible a pedido.

PRODUCTO SANITARIO, USAR CON PRECAUCIÓN

Por favor, lea la etiqueta del producto para más información.

Steranios 2%



Steranios 2% y Bandelettes Steranios 2% (tiras)

Desinfectante de alto nivel

- Producto listo para usar: sin necesidad de activación previa
- Control de la conformidad de la solución desinfectante mediante tiras reactivas.




Steranios 2%

Desinfectante de alto nivel

Características

- Solución verde
- 2% solución de glutaraldehído tamponada a pH 6 (citrato sódico)
- Amplia compatibilidad con todo tipo de materiales

Instrucciones de uso

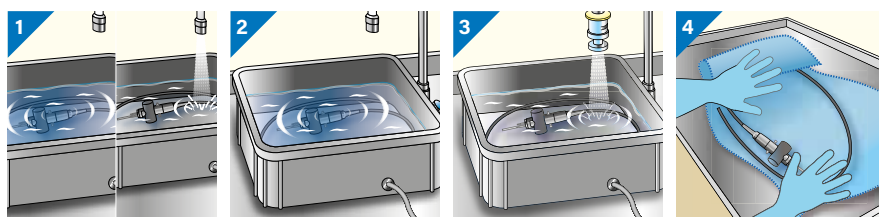

1 Fase de predesinfección: Limpiar el producto sanitario con un detergente o un producto predesinfectante. Enjuagar abundantemente.

2 Fase de desinfección: Vierta la solución. Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. No añadir ningún producto en el STERANIOS 2%.

3 Enjuague abundantemente con agua estéril o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier resto de producto. Para equipos endoscópicos: Enjuague las partes internas y externas del producto sanitario.

4 Secar con una toallita de uso único. Mantener el producto sanitario lo más aséptico posible para reutilizarlo.

Propiedades microbiológicas

Reivindicaciones de eficacia/condiciones	Tiempo de contacto
Bactericida* según EN 13727/EN 14561*	5 min
Levuricida* según EN 13624/EN 14562*	5 min
Fungicida* según EN 13624/EN 14562*	10 min
Tuberculicida* según EN 14348/EN 14563*	10 min
Micobactericida* según EN 14348/EN 14563*	10 min
Virucida* según EN 14476/EN 17111*	10 min
Esporicida frente a Clostridium difficile* según EN 17126*	60 min

*=condiciones de limpieza

Embalaje

Producto	Unidad de embalaje	Referencia
Steranios 2%	4 x envases de 5 L	3112070
Steranios 2%	Tiras reactivas de Steranios 2%	3134004

Indicaciones

Desinfectante de alto nivel de los instrumentos termosensibles y del material de endoscopia.

Instrucciones de uso

Solución lista para usar. No diluir. Limpiar y enjuagar minuciosamente el producto sanitario antes de sumergirlo en STERANIOS 2%.

1. Fase de predesinfección: Limpiar el producto sanitario con un detergente o un producto predesinfectante. Enjuagar abundantemente.
2. Fase de desinfección: Vierta la solución. Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. No añadir ningún producto en el STERANIOS 2%.
3. Enjuague abundantemente con agua estéril o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier resto de producto. Para equipos endoscópicos: Enjuague las partes internas y externas del producto sanitario.
4. Secar con una toallita de uso único. Mantener el producto sanitario lo más aséptico posible para reutilizarlo.

Para garantizar la eficacia del desinfectante, compruebe el nivel de glutaraldehído con una tira de prueba de STERANIOS 2% al inicio de la sesión, al recomenzar después de una interrupción y por lo menos una vez al día. Conservación máxima en el baño de inmersión: 30 días excepto en Francia 7 días.

Composición

Solución de glutaraldehído (al 2%) en tampón a pH 6, surfactante, colorante y excipientes.

Almacenamiento

Peligroso - respete las precauciones de uso (elaboradas según la normativa europea vigente en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenamiento: de +5°C a +25°C.

Certificados

Producto sanitario. La información sobre la actividad antimicrobiana completa se encuentra recogida en el dossier de producto disponible bajo petición.

Producto Sanitario

Por favor leer la etiqueta del producto.

Bandelettes Steranios 2% (tiras)

Desinfectante de alto nivel

Indicaciones

100 tiras de control del índice de glutaraldehído en la solución de STERANIOS 2%.

Instrucciones de uso

- Mojar la tira durante un segundo, sacarla sacudiéndola para eliminar el exceso de líquido
- Lectura tras 15 segundos
Rosa uniforme - CONFORME
Rosa naranja - NO CONFORME
- No interpretar un resultado obtenido en más de 30 segundos tras la inmersión
- Para la frecuencia de uso, consulte las instrucciones de la etiqueta del STERANIOS 2%

Condiciones de almacenado

Volver a cerrar el tubo tras haber sacado una tira. Conservar protegido de la humedad. Respetar la fecha límite de uso indicada en la etiqueta. Conservar 90 días tras su apertura. Almacenar entre 5°C y 25°C.

Precauciones de uso

Eliminar el producto y su recipiente tomando todas las precauciones de uso. Uso reservado a los profesionales.

Lectura tras 15 segundos:


Conforme

Rosa naranja



No conforme

Rosa naranja

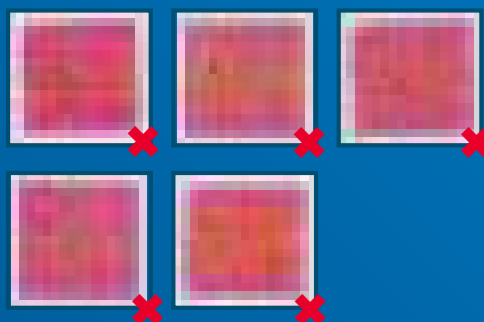

RENOVADOR DEL ACERO INOXIDABLE

Anios R444

RENOVADOR DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE

- Elimina las picaduras causadas por el óxido (pasivación)
- Elimina los depósitos minerales
- Usar por inmersión. Sistema de dosificación integrado



Anios R444

Renovador de instrumental de acero inoxidable



Anios R444
Botella con dosificador


CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Líquido transparente incoloro a ligeramente amarillo
- Densidad a 20°C: 1.360 g/ml
- pH Producto puro*: < 3
- pH producto diluido 3%*: alrededor de 1.5
- pH producto diluido 5%*: alrededor de 1.2
- Conductividad al 3% - 5%: 4.20 - 13.26 - 21.8 mS/cm


*Mediciones del valor de pH en condiciones de funcionamiento con un pHímetro con compensación de temperatura

INSTRUCCIONES DE USO


Solución concentrada para uso profesional.

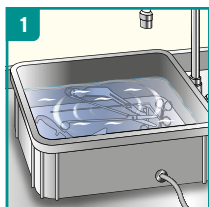

1 Usar sumergiendo el instrumental en una dilución de 3% a 5% en agua tibia. Tiempo de remojo: 1 hora.

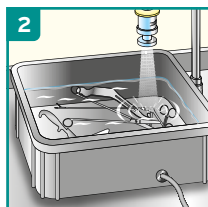

2 Enjuagar con cuidado

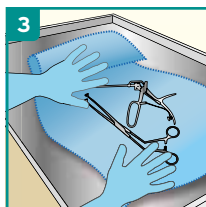

3 Secar

Renovar el baño de remojo al menos una vez al día. Usar solo en superficies de acero inoxidable.

PRESENTACIONES

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
Anios R444	3 x Envases de 1 L	2932



LABORATOIRES ANIOS
CE 1, Rue de l'Espoir
59260 Lille Lezennes
France

Distribuido por:
INSTRUNET HOSPITAL SLU
Ctra Sabadell a Granollers km 14,5
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
España

InstrUNET
HOSPITAL

LABORATOIRES
ANIOS
An Ecolab Company



PARA USO PROFESIONAL.

ÁREA DE APLICACIÓN

Producto especial para la renovación de instrumental de acero inoxidable y productos sanitarios. Elimina trazas de proteínas, depósitos de óxido de hierro y otras marcas de oxidación.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada para uso profesional. Usar sumergiendo el instrumental en una dilución de 3% a 5% en agua tibia. Tiempo de remojo: 1 hora. Enjuagar con cuidado y secar. Renovar el baño de remojo al menos una vez al día. Usar solo en superficies de acero inoxidable.

COMPOSICIÓN

Ácido fosfórico, surfactantes

ALMACENAMIENTO

Peligroso- respetar las precauciones de uso (elaborado de acuerdo con las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenamiento: + 5°C a + 25°C.

CERTIFICACIÓN

Bajo demanda

PRODUCTO SANITARIO, USAR CON PRECAUCIÓN

Por favor lea la etiqueta para mas información de producto

AGENTE DE ENJUAGUE PARA INSTRUMENTACIÓN

Anios RL

AGENTE DE ENJUAGUE PARA INSTRUMENTACIÓN

- Activador de secado para un secado rápido y sin marcas
- Alta compatibilidad con polisulfonas
- Adecuado para uso en todo tipo de máquinas



Anios RL

Agente de enjuague para instrumentación



Anios RL
Envase de 5 L

Anios RL
Envase de 10 L

Anios RL
Envase de 25 L

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Líquido incoloro
- pH de producto puro a 20 °C: 7,2 aprox.
- pH diluido a 0.08 %*: 5,8 aprox.
- pH diluido a 0.3 %*: 6,2 aprox.
- Densidad a 20 °C: 1,013

*Mediciones del valor de pH en condiciones de funcionamiento con un pH-metro con compensación de temperatura

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Anios RL	2 x envases de 5 L	0315.038
Anios RL	1 x envase de 10 L	0315.024
Anios RL	1 x envase de 25 L	0315.018
Anios RL	1 x barril de 200 L	0315.331

ÁREA DE APLICACIÓN

Agente de enjuague neutro para instrumentos quirúrgicos y médicos. Producto combinado que garantiza un secado rápido y sin marcas.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada. Se utiliza en diluciones del 0,08 al 0,3 % en agua fría o caliente (de 0,8 a 3 ml por litro de agua) según el tipo de máquina.

COMPOSICIÓN

Asociación de agentes tensioactivos, agente antiespumante, agente estabilizante, excipientes.

ALMACENAMIENTO

Peligroso - respetar las precauciones de uso (elaborado de acuerdo con las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenamiento: + 5°C a + 25°C.

CERTIFICACIÓN

Bajo demanda.

PRODUCTO SANITARIO, USAR CON PRECAUCIÓN

Por favor, lea la etiqueta del producto para más información.



PARA USO PROFESIONAL.



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France





DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUELOS Y SUPERFICIES

SURFANIOS Premium

DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUELOS Y SUPERFICIES

Limpieza y desinfección de dispositivos médicos no invasivos antes de su uso y de acuerdo con sus instrucciones de uso.
Biocida: para superficies generales.

- Doble acción: combina la acción detergente y desinfectante en una sola operación.
- Amplio espectro de eficacia en tiempos de contacto cortos.
- Agente quelante fácilmente biodegradable.



ECOLAB®

www.ecolab.com

LABORATOIRES
ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

SURFANIOS Premium

Detergente desinfectante de suelos y superficies

CARACTERÍSTICAS:

- Solución color verde.
- pH del producto: 10.9
- pH del producto diluido (0.25%): aprox. 8.5
- Densidad a 20°C: 1.009 g/ml
- Índice de refracción: 1.3587

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

EFICACIA	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida - Conforme a: EN 13727* (5 min 0.25%), EN 16615* (15 min, 0.25%)	0.25 %	15 min
Levaduricida - Conforme a: EN 13624* (15 min, 0.25%), EN 16615* (15 min, 0.25%)	0.25 %	15 min
Tuberculocida - Conforme a EN 14348*	0.50 %	30 min
Eficaz contra virus envueltos conforme a EN 14476*	0.25 %	5 min
Actividad virucida de espectro limitado conforme a EN 14476*	2.0 %	30 min
Adenovirus conforme a EN 14476*	1.0 %	30 min
Norovirus (MNV) conforme a EN 14476*	1.0 % / 2.0 %	60 min / 30 min

*condiciones sucias

MODO DE EMPLEO



1. Llenar un recipiente de lavado y un recipiente de aclarado con 8 litros de agua. Dilución al 0,25% Verter una dosis de 20 ml de SURFANIOS PREMIUM en el recipiente de lavado.



2. Proceder al lavado respetando el esquema de limpieza: desde el fondo hasta la salida. No aclarar la superficie.



3. Lavar y escurrir la franja antes de el baño en la cubeta. (El transporte de los hogares no es ser colocado en la habitación, pero en el pasillo).



4. Después de limpiar cada sector, cambie la gasa y renueve la solución de lavado y de aclarado. Introduzca las gasas sucias en el recipiente previsto para este fin.

ÁREA DE APLICACIÓN

Detergente desinfectante para pisos y superficies.

Limpieza y desinfección de dispositivos médicos no invasivos antes de su uso y de acuerdo con sus instrucciones de uso.

Biocida: para superficies generales.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada.

Diluir el concentrado con agua hasta alcanzar la concentración deseada.

Para preparar una solución con una concentración del 0,25 % (2,5 mL/L), añada 20 mL de producto por cada 8 litros de agua fría o caliente (máx. +60 °C). Aplique una cantidad suficiente (aprox. 30 mL/m²).

Respete el tiempo de contacto recomendado para garantizar la actividad antimicrobiana requerida.

Para dispositivos médicos: enjuague abundantemente con agua del grifo para eliminar cualquier residuo del producto. Para aplicaciones biocidas: no es necesario enjuagar, excepto en las superficies tratadas que entren en contacto con la piel. Para conocer la frecuencia de uso y el procedimiento de limpieza del equipo de aplicación, consulte el plan de higiene vigente.

La documentación científica (eficacia, compatibilidad, etc.) está disponible bajo solicitud.

INGREDIENTES

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina (CAS n.º 2372-82-9: 51 mg/g), cloruro de didecildimetilamonio (CAS n.º 7173-51-5: 25 mg/g), tensioactivos no iónicos, agentes secuestrantes, colorante, perfume y excipientes.

CERTIFICADOS

Dispositivo médico y biocida.

La actividad antimicrobiana completa de SURFANIOS Premium se encuentra documentada en el expediente científico, disponible bajo solicitud.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre +5°C y +25°C.

PRODUCTO SANITARIO Y BIOCIDA. USAR CON SEGURIDAD

Lea la etiqueta e información del producto.



PARA USO ÚNICO PROFESIONAL.

SURFA'SAFE Premium



Solución limpiadora y desinfectante de los productos sanitarios

Solución detergente desinfectante

Solución detergente desinfectante para la limpieza y la desinfección de los productos sanitarios no sumergibles y no invasivos.

SURFA'SAFE PREMIUM es un detergente- desinfectante de superficies listo para usar. Combina un amplio espectro de eficacia, tiempos de contacto cortos y compatibilidad excelente (incluyendo superficies sensibles al alcohol) con las propiedades de un detergente.

Sus características hacen de SURFA' SAFE PREMIUM un producto adecuado para una amplia gama de superficies hospitalarias y un producto ideal para cuidados intensivos y otras áreas de riesgo del hospital.

Esto permite que se pueda utilizar según lo previsto en los protocolos de uso, obteniendo así unos resultados de desinfección y el nivel de cumplimiento obligatorios para una desinfección eficaz restringiendo la propagación de patógenos.

- buenas propiedades espumantes.
- formulado eficientemente sin ingrediente innecesarios (perfume o colorantes).
- limpieza y desinfección en un solo paso, dejando la superficie visiblemente limpia.



SURFA'SAFE Premium

Solución detergente desinfectante para la limpieza y la desinfección de los productos sanitarios no sumergibles y no invasivos.



SURFA'SAFE Premium
750ml Frasco de spray

Características

- Limpia y desinfecta en un solo paso
- No contiene alcohol, ni perfume, ni tinte
- Amplio espectro antimicrobiano y tiempo de contacto óptimo
- Válvula pulverizadora en espuma que evita la formación de aerosoles volátiles
- Su formulación asegura la compatibilidad con un amplio número de materiales incluyendo polímeros (por ej. Policarbonato, plexiglas)
- Espuma densa que mejora la adhesión a la superficie
- pH 6

Propiedades microbiológicas

Eficacia	Tiempo de contacto
Bactericida - De conformidad con las normativas: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Levaduricida - De conformidad con las normativas: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Tuberculicida - De conformidad con la normativa EN 14348*	60 min
Efectivo contra virus con envoltura de conformidad con la normativa EN 14476*	1 min
EN 14476* Poliovirus SV40	5 min
EN 14476* Rotavirus	30 sec
Viricida de especto limitado de conformidad con la normativa EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

* condiciones de suciedad

Información para pedido

Producto	Presentación	Referencia
SURFA'SAFE Premium	12 x 750 ml	3133602

Indicación

Solución detergente desinfectante para la limpieza y la desinfección de los productos sanitarios no sumergibles y no invasivos.

Modo de empleo

Solución lista para usar.
Pulverizar la solución detergente desinfectante sobre una fibra no tejida y limpiar.
Repartir bien el producto (+/- 6 ml/m² es decir aproximadamente 10 pulverizaciones).
Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada.
El enjuague solo sirve si las zonas tratadas están destinadas a entrar en contacto con la piel o con las mucosas.
Consulte las instrucciones de uso del fabricante para la limpieza y la desinfección de los productos sanitarios.
Para la frecuencia de uso y la limpieza del material de aplicación, consulte el plan de higiene in situ. Expediente científico (eficacia, compatibilidad, etc.) disponible bajo solicitud.

Ingredientes

Cloruro de didecildimetilamonio (N°CAS 7173-51-5: 3 mg/g), Tensioactivos no iónicos, agente secuestrante, excipientes.

Almacenje

Almacenar entre +5°C y +25°C.

Producto sanitario

Utilizar de forma segura

Lea el etiquetado y la información del producto.



PARA USO ÚNICO PROFESIONAL.

CONJUNTO DE PISTOLAS PRESURIZADAS PARA LIMPIEZA



CP203
agua y detergente



CP206
agua y aire

LIMPIEZA, ENJUAGUE Y SECADO

- Reduce la carga microbiana en los artículos
- Reduce el costo en el proceso de limpieza
- Ayuda en la remoción de los residuos y fragmentos que se adhieren a los lúmenes

CP200

REGISTRO ANVISA: CLASE I 80316870005

El CP200 es un equipo multifuncional desarrollado para realizar limpieza, enjuague y secado de artículos odonto-médico-hospitalarios, en especial los canulados y endoscopios flexibles. El CP200 es indicado para limpieza de instrumentales quirúrgicos como lúmenes estrechos y largos, acoplamientos y encajes, ranuras, fresas, tornillos, cremalleras, artículos de asistencia ventilatoria, además de los endoscopios.

•CARACTERISTICAS•

Pistolas con boquillas cónicas de silicona que encajan en lúmenes de Ø3mm a Ø23mm, que permiten la conexión perfecta de las pistolas a los canulados

Posee sistema de sensoriamiento inteligente, que identifica la pistola en uso e inactiva las demás

Accionamiento de las pistolas por pedal, lo que evita la ocurrencia de DORT (Disturbio Osteomuscular Relacionado al Trabajo) en el profesional

Mangueras espiraladas que se estiran en hasta 3,5 metros

Producidos en material compatible, anticorrosivo y altamente resistente a las sustancias utilizadas en la limpieza

Pistolas señalizadas y diferenciadas por colores

Moderno sensor indica al operador sobre la necesidad de reposición de material (alcohol o detergente).

REQUISITOS DE INSTALACIÓN



RECOMENDACIONES

- La calidad del agua necesita ser por lo menos potable, en el caso de que no sea, es necesario la instalación de un filtro de 5 micra
- En el caso de que no tenga red de aire comprimido, es necesario la adquisición de un compresor de aire
- Si el agua no tiene la presión indicada, recomendamos la instalación de bomba para presurización

DISTRIBUIDO POR

•VENTAJAS•

Aumenta la eficacia del proceso de desinfección y esterilización

Fácil de limpiar

Atiende a la RDC N° 06, de 01 de marzo de 2013, ART. 28 - Para el secado de los equipos con canales, los servicios deben disponer de aire comprimido medicinal, gas inerte o aire filtrado, seco y exento de aceite

Atiende a la RDC N° 15, de 15 de marzo de 2012, ART. 69 - El CME clase II y la empresa procesadora deben utilizar pistola de agua bajo presión para limpieza manual de productos con lumen y aire comprimido medicinal, gas inerte o aire filtrado, seco y exento de aceite para secado de los productos.

Dimensiones y Peso

	Dimensiones y Peso	Conjuntos con 2 ou 3 Pistolas
Altura	23cm	23,1cm
Ancho	38cm	14cm
Profundidad	22cm	18,5cm
Peso	6kg	3kg

Requisitos Hidráulicos

Presión de Agua: 2 a 3,5 Kgf / cm ²
Calidad del agua: Potable
Conexión de entrada: 3/4 y registro
Punto de Aire: 1/4 "con presión de 1,5 a 3 Kgf / cm ²

Requisitos Eléctricos

	Conjuntos con 2 ou 3 Pistolas
Tensión	110/220Vac
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	100W
Enchufe	2P+T

NOVEDADES

Dilución automática del detergente enzimático en las proporciones de 0,2% a 1,5%

Succión directo del galón

Panel digital con interfaz interactiva y amigable

Nuevo diseño más moderno

Hecho de material de baja porosidad, más liviano y resistente

Bivolt

PRODUCTOS RECOMENDADOS



ANIOSYME 5



(16) 3707 1200

www.endoclear.com.br
sac@endoclear.com.br

ENDOCLEAR

SOLUCIONES EN ENDOSCOPIA



GEL HIDROALCOHÓLICO PARA MANOS DISEÑADO PARA USO FRECUENTE

Aniosgel 85 NPC

GEL DE MANOS A BASE DE ALCOHOL PARA DESINFECCIÓN HIGIÉNICA Y QUIRÚRGICA DE LAS MANOS

Gel tixotrópico con emolientes cosméticos diseñado para un uso frecuente.

- Contiene ingredientes calmantes para la piel
- Eficaz contra bacterias, levaduras, mohos y virus
- Sin perfume ni colorantes
- Dermatológicamente probado
- Amplia gama de opciones de dispensación



Aniosgel 85 NPC

Gel hidroalcohólico para manos diseñado para uso frecuente.



500ml



1L Bomba



1L Airless

APLICACIÓN

TIPO DE PRUEBA	ESTÁNDAR	TIEMPO DE CONTACTO
Aplicar Aniosgel 85 NPC sin diluir sobre las manos secas. Mantener las manos húmedas durante todo el tiempo de contacto.		
Higiene de manos	EN1500	30 seg.
Desinfección quirúrgica de manos	EN12791	90 seg.

TIPO DE PRUEBA	ESTÁNDAR	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida	EN13727	30 seg.
Levaduricida	EN13624	30 seg.
Micobactericida	EN14348	30 seg.
Virucida de espectro limitado*	EN14476	30 seg.
Virucida	EN14476	2 mins

* EN 14476 La eficacia virucida de espectro limitado incluye adenovirus, norovirus y virus con envoltura.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
ANIOSGEL 85 NPC	12 X 500ML	3134331
ANIOSGEL 85 NPC	12 X 1L	3134391
ANIOSGEL 85 NPC AIRLESS	12 X 1L	3150294



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.
Avinguda del Baix Llobregat nºs. 3-5
Sant Joan Despí-08970

MODO DE EMPLEO

Aplicar la solución sin diluir sobre las manos secas. Frotar bien las manos, asegurándose de que todas las áreas estén mojadas durante todo el tiempo de contacto. Frotar hasta que las manos estén completamente secas.

No enjuagar.

INGREDIENTES

Etanol (CAS Nº 64-17-5: 700 mg/g), con agentes espesantes, humectantes y calmantes y agua, sin fragancia ni colorante.

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en el envase original a una temperatura entre 5 °C y 25 °C, fuera de la luz solar directa.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO Y RESIDUO

Consulte la hoja de datos de seguridad.+A106.



BIOCIDAS PARA LA HIGIENE HUMANA
(GRUPO PRINCIPAL 1 - PT1).

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA.
SIEMPRE LEA LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO.

ECOLAB®

www.ecolab.com

CT40

Cinta de sellado de paquetes de esterilización con indicador de proceso para el monitoreo de procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrogeno.

Características

Indicador Químico Tipo 1.

Rollo de cinta autoadhesiva impresa con tinta indicadora.

Tamaño: 50 m x 20 mm.

Color inicial: púrpura.

Color final: verde.

100 % Libre de Metales Pesados.



Superficie de la cinta tratada con materiales de cobertura que permiten una escritura fácil y permanente. Adhesivo capaz de adherirse a envolturas de tela, papel y plástico. Diseñado con altas tecnologías que aseguran que la cinta se mantenga adherida a la superficie luego de la esterilización y que no queden rastros de adhesivo en la superficie de los materiales una vez retirada.



Normativa aplicable

Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.
ISO 11140-1:2014.

CT50

Monitoreo de procesos de esterilización por Formaldehído. Para uso externo.

Condiciones: 15 min., 70 °C, 1,0 mol/l FORM.

Características

Indicador Químico Tipo 1.

Rollo de cinta autoadhesiva impresa con tinta indicadora.

Tamaño: 50 m x 18 mm.

Color inicial: marrón/rojo.

Color final: verde.

100 % Libre de Metales Pesados.



Superficie de la cinta tratada con materiales de cobertura que permiten una escritura fácil y permanente. Adhesivo capaz de adherirse a envolturas de tela, papel y plástico. Diseñado con altas tecnologías que aseguran que la cinta se mantenga adherida a la superficie luego de la esterilización y que no queden rastros de adhesivo en la superficie de los materiales una vez retirada.



Normativa aplicable

Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.
ISO 11140-1:2014.

Código	Controles químicos para lavado	Producto	Uso	Características
PRO1 MICRO	Sistema de Control de Higiene PRO1 MICRO Sistema de lápiz de alta sensibilidad para la detección y cuantificación de proteínas en superficie.		Diseñado para detectar y cuantificar con una elevada sensibilidad proteínas y agentes reductores en superficies y zonas de difícil acceso luego del proceso de lavado.	El sistema cuenta con una solución de reacción y con un hisopo de alta absorción, el cual permite la recolección de muestras en distintos tipos de superficies con igual eficacia.
CDWA4	Indicador de lavado Para pruebas de eficacia de lavado.		Diseñado para el control rutinario de procesos de lavado y monitoreo de la efectividad de máquinas lavadoras automáticas, así como para el monitoreo en lavadoras ultrasónicas que funcionen a frecuencias iguales o mayores a 35 kHz y temperaturas entre 30 °C y 70 °C.	Nivel de desafío: muy alto. Detecta todos los factores que afectan el resultado de un proceso de lavado. Color inicial: fucsia. Tamaño: 70 mm x 30 mm (aproximado). Soporte sintético estable a la temperatura. Resultado: eliminación de la sustancia orgánica fucsia.
CDWAH	Soporte para indicadores de lavado.		Diseñado para contener los indicadores Chemdye® CDWA e Integrator® IT27W para realizar el control de rutina de los procesos de limpieza y desinfección térmica en máquinas automáticas.	El soporte está diseñado para simular los desafíos que implica la limpieza de una gran carga durante el ciclo de lavado, y puede ser fijado en la bandeja, lo que permite una localización reproducible del indicador de limpieza en la lavadora-desinfectora.
CDWU	Indicador de lavado por ultrasonido para pruebas de capacidad de cavitación.		Diseñado para el control de rutina de procesos de limpieza por ultrasonido y para el monitoreo de la eficacia de la cavitación ultrasónica de lavadoras de ultrasonido que operan a frecuencias iguales o superiores a 35 kHz y a temperaturas en el rango 18 °C a 70 °C.	Permite la detección de deficiencias en la capacidad de cavitación de la máquina lavadora ultrasónica. Cada vial es acompañado por una Tarjeta de Registro autoadhesiva donde se puede registrar la información sobre el proceso de control de lavado por ultrasonido.
IT27W-5	Indicador de lavado y termodesinfección, para control de rutina de procesos de desinfección térmica.		Diseñado para el monitoreo de procesos de desinfección por calor húmedo en lavadoras desinfectadoras.	Tira unilaminada impresa con tinta indicadora, soporte sintético estable a la temperatura.

Código	Controles biológicos autocontenidos para esterilización	Tiempo de incubación	Normatividad aplicable
BT224	- Sistema de lectura súper rápida por fluorescencia. - Control de procesos de esterilización por vapor asistidos por vacío y con desplazamiento de aire por gravedad a 121-135 °C.	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017 e ISO 11138-3:2017; - IRAM 37102-1:1999 e IRAM 37102-3:1999.
BT222	- Sistema de lectura súper rápida por fluorescencia. - Control de procesos de esterilización por vapor asistidos por vacío y con desplazamiento de aire por gravedad a 121-135 °C.	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017 e ISO 11138-3:2017. - IRAM 37102-1:1999 e IRAM 37102-3:1999.
BT220	- Sistema de lectura rápida por fluorescencia. - Control de procesos de esterilización por vapor asistidos por vacío y con desplazamiento de aire por gravedad a 121-135 °C.	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017 e ISO 11138-3:2017. - IRAM 37102-1:1999 e IRAM 37102-3:1999.
BT20	- Sistema de lectura por cambio de color. - Control de procesos de esterilización por vapor asistidos por vacío y con desplazamiento de aire por gravedad a 121-135 °C.	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017 e ISO 11138-3:2017. - IRAM 37102-1:1999 e IRAM 37102-3:1999.
BT20/6	- Sistema de lectura por cambio de color. - Control de procesos de esterilización por vapor asistidos por vacío y con desplazamiento de aire por gravedad a 121-135 °C.	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017 e ISO 11138-3:2017. - IRAM 37102-1:1999 e IRAM 37102-3:1999.
BT24/6	- Ampollas autocontenidas con esporas - Sistema de lectura por cambio de color. - Control de procesos industriales de esterilización por vapor de líquidos en pequeños contenedores a baja temperatura entre 110 °C - 121 °C.	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017 e ISO 11138-3:2017. - IRAM 37102-1:1999 e IRAM 37102-3:1999.

BT102	- Sistema de lectura rápida por fluorescencia. - Control de los ciclos de esterilización por Formaldehído.	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017 e ISO 11138-5:2017. - IRAM 37102-1:1999.
--------------	---	---	--

	Código	Controles biológicos autocontenidos para esterilización	Tiempo de incubación	Normatividad aplicable
PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO	BT96	- Sistema de lectura rápida por fluorescencia. - Control de procesos de esterilización por plasma o vapor de peróxido de hidrógeno (H₂O₂).	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017 - IRAM 37102-1:1999.
	BT95	- Sistema de lectura rápida por fluorescencia. - Control de procesos de esterilización por plasma o vapor de peróxido de hidrógeno (H₂O₂).	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017 - IRAM 37102-1:1999.
	BT91	- Sistema de lectura por cambio de color. - Control de procesos de esterilización por plasma o vapor de peróxido de hidrógeno (H₂O₂).	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017 e ISO 11138-5:2017 - IRAM 37102-1:1999.
ÓXIDO DE ETILENO	BT110	- Sistema de lectura rápida por fluorescencia. - Control de los ciclos de esterilización por Óxido de Etileno.	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017 e ISO 11138-2:2017. - IRAM 37102-1:1999 e IRAM 37102-2:1999.
	BT10	- Sistema de lectura por cambio de color. - Control de los ciclos de esterilización por Óxido de Etileno.	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017 e ISO 11138-2:2017. - IRAM 37102-1:1999 e IRAM 37102-2:1999.
O. E. Y CALOR SECO	BT40/6	- Indicador biológico en tiras con esporas. - Control de procesos de esterilización por Óxido de Etileno (OE) y calor seco.	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017, ISO 11138-2:2017 e ISO 11138-4:2017. - IRAM 37102-1:1999 e IRAM 37102-2:1999.
RADIACIÓN GAMMA	BT70/6	- Indicador biológico en tiras con esporas. - Control de procesos de esterilización por Radiación Gamma.	 	- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11138-1:2017. - IRAM 37102-1:1999

Código	Características	Producto	Normatividad aplicable
IT26-1YS	- Indicador químico tipo 5. - Tiras laminadas por una cara impresas con tinta indicadora - Control de procesos de esterilización por Vapor entre 121 °C y 135 °C.		- ISO 13485:2016/NS-EN, ISO 13485:2016. - ISO 11140-1:2014.
IT27-7YS	- Indicador químico tipo 6. - Tira unilaminada impresa con tinta indicadora. - Control de procesos de esterilización por Vapor. Condiciones de emulación: 7 minutos, 134 °C // 20 minutos, 121 °C.		- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11140-1:2014
CD23	- Indicador químico, etiqueta doble autoadhesiva impresa con tinta indicadora. - Control de procesos de esterilización por Vapor.		- ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012. - ANMAT PM 1614-4.
CD13	- Indicador químico, doble etiqueta autoadhesiva impresa con tinta reactiva. - Control de procesos de esterilización por Óxido de Etileno (OE).		- ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012. - ANMAT PM 1614-4.
CD53	- Indicador químico, etiqueta doble autoadhesiva impresa con tinta indicadora. - Control de procesos de esterilización con formaldehído.		- ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. - ISO 11140-1:2014.
CD43	- Indicador químico, etiqueta doble autoadhesiva impresa con tinta indicadora. - Control de procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno.		- ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012. - ANMAT PM-1614-4.
CD77	- Indicador químico, etiqueta autoadhesiva (punto) impresa con tinta reactiva. - Control de procesos de esterilización por Radiación Gamma.		- ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012. - ANMAT PM 1614-4
CG3	- Etiquetadora de 3 líneas. - Etiquetadora manual que permite el etiquetado rápido y sencillo de paquetes de esterilización con etiquetas Chemdye® CD13 / CD23 / CD33 / CD43 / CD53 / CD83.		ISO 13485 2016/NS-EN, ISO 13485:2016.

IC10/20 FR Incubadora con sistema de lectura automática

Para la incubación y lectura de:

Indicadores Biológicos Bionova® con Sistema de Lectura Rápida por Fluorescencia: BT220 (Vapor): 3 hs. a 60 °C, BT221 (Vapor): 1 h. a 60 °C, BT110 (OE): 4 hs. a 37°C, BT102 (Formaldehído): 2 hs a 60°C, BT95 (VH2O2): 2 hs. a 60°C.

Indicadores Biológicos Bionova® con Sistema de Lectura Súper Rápida por Fluorescencia: BT222 (Vapor): 1 hs. a 60°C, BT223 (Vapor): 30 min at 60 °C, BT96 (VH2O2): 30 min. a 60°C.

Indicadores Biológicos Bionova® con Sistema de Lectura Ultra Rápida por Fluorescencia: BT224 (Vapor): 20 min. a 60°C.

Sistema de lápiz para detección de proteínas Chemdye® PRO1 MICRO: 7 min a 60 °C.

Características

12 posiciones (3.8 cm de profundidad, 0,9 cm de diámetro) para incubación de Indicadores Biológicos Auto-contenidos de Lectura Rápida, Súper Rápida y Ultra Rápida por Fluorescencia.

1 posición (3.8 cm de profundidad, 1.0 cm de diámetro) para incubación de lápiz de detección de proteínas.

Orificio especial para termómetro externo.

1 rompe ampollas.

Sistema de Temperatura Dual: permite seleccionar entre dos temperaturas de incubación.

Permite seleccionar diferentes tiempos de incubación de manera simultánea.

Conexión USB para el registro de resultados en PC mediante un software de Lectura y Trazabilidad.

Impresora Térmica de Resultados para registro en libro de esterilización.

Detección y cancelación automática de la lectura de fluorescencia del indicador biológico.

Longitud de onda de lectura de fluorescencia: ~460 nm.

Dimensiones: 18.0 cm de alto, 26.0 cm de diámetro.

Rango de Voltaje: 100 – 240 V CA.

Potencia: 28 W.

Frecuencia: 50 – 60 Hz.

Normativa aplicable

Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.



Catálogo

Descripción

IC10/20FR	Incubadora con sistema de lectura automática para indicadores biológicos rápidos o super rápidos, y para sistemas de monitoreo de higiene.
ICTP	Papel registrador para la incubadora IC10/20FR.

MINIBIO / Incubadora con sistema de lectura automática

Para la Incubación y lectura de:
Indicadores Biológicos Bionova® con Sistema de Lectura Rápida por Fluorescencia: BT220 (Vapor): 3 h a 60 °C, BT221 (Vapor): 1 h a 60 °C, BT110 (OE): 4 h a 37 °C. BT102 (Formaldehído): 2 h a 60 °C. BT95 (VH2O2): 2 h a 60 °C.
Indicadores Biológicos Bionova® con Sistema de Lectura Súper Rápida por Fluorescencia: BT222 (Vapor): 1 h a 60 °C, BT223 (Vapor): 30 min at 60 °C, BT96 (VH2O2): 30 min. a 60 °C.
Indicadores Biológicos Bionova® con Sistema de Lectura Ultra Rápida por Fluorescencia: BT224 (Vapor): 20 min. a 60 °C.

Características

- 3 posiciones (38 mm de profundidad, 9 mm de diámetro) para incubar Indicadores Biológicos Auto-contenidos de Lectura Rápida, Súper Rápida y Ultra Rápida por Fluorescencia.
- 1 rompe ampollas.
- Orificio para termómetro externo.
- Tapa superior incorporada.
- Sistema de Temperatura Dual: permite seleccionar entre dos temperaturas de incubación (37 °C y 60 °C).
- Conexión USB para el registro de resultados en PC mediante un software de Lectura y Trazabilidad.
- Permite incubar 3 indicadores simultáneamente, en programas diferentes, a la misma temperatura.
- Impresora Térmica de Resultados.
- Alarma sonora para indicación de eventos.
- Detección y cancelación automática de la lectura de fluorescencia del indicador biológico.
- Longitud de onda de lectura de fluorescencia: ~460 nm .
- Actualización de firmware por parte del usuario.
- Dimensiones: 105mm de alto, 156mm de ancho y 145 mm de profundidad.
- Rango de Voltaje: 100 –240 V CA.
- Potencia: 28 W.
- Frecuencia: 50 –60 Hz.

Normativa aplicable

- Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.
- Directiva Bajo Voltaje 2014/35/UE.
- Directiva CEM 2014/30/UE.
- Directiva RoHS 2011/65/UE.
- Directiva RAEE 2012/19/UE



Catálogo

Descripción

MiniBio	Incubadora con sistema de lectura automática para indicadores biológicos rápidos o super rápidos, con tres posiciones.
ICTP Mini	Papel registrador para la incubadora MiniBio

Lavadoras Termodesinfectadoras

MATACHANA dispone de una gama específica de lavadoras desinfectadoras diseñadas para trabajar de forma continuada y al máximo rendimiento, ideales para el lavado de material de laboratorio (Glassware) en universidades, laboratorios de microbiología, centros de investigación y en cualquier tipo de instalación en el que empleen materiales de vidrio reutilizables.

Especialmente desarrolladas para instalaciones con un espacio limitado, cuentan con una amplia variedad de accesorios para el lavado de todo tipo de cristal.

LAVADORAS		
Modelo	Dimensiones cámara (mm) (ancho x alto x profundo)	Volumen útil cámara (litros)
MAT LD60	520 x 545 x 515	146
MAT LD90	520 x 545 x 515	146
MAT LD100	540 x 597 x 610	225
MAT LD500	550 x 591 x 622	236
MAT LD1000	708 x 740 x 845	420



MAT LD1000



MAT LD500



MAT LD100



MAT LD90

MAT LD60

Esterilizadores de vapor

Matachana SC500 y S1000

La evolución de un éxito


Los esterilizadores Matachana de la serie SC500 Y S1000 han sido diseñados teniendo en consideración las necesidades reales de la esterilización hospitalaria hoy día, tanto en centrales de esterilización, como en bloques quirúrgicos, centros ambulatorios, servicios de esterilización externalizados, etc.

Se diseñan y fabrican en nuestro centro de producción de Barcelona (España), una nueva planta dotada de los más recientes avances tecnológicos en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y control de procesos.

Esterilizadores de vapor SC500

	SC500		SC501		SC502	
Especificaciones técnicas	1 puerta	2 puertas	1 puerta	2 puertas	1 puerta	2 puertas
Dimensiones totales (mm)						
Altura	1824	1824	1824	1824	1824	1824
Anchura	900	900	900	900	900	900
Profundidad	995	1009	1342	1355	1622	1635
Dimensiones de cámara (mm)						
Altura	500	500	500	500	500	500
Anchura	500	500	500	500	500	500
Profundidad	675	675	1020	1020	1300	1300
Potencia (kW)*						
Con generador	21	21	21	21	21	21
Sin generador	2	2	2	2	2	2
Volúmen de cámara (litros)	167	167	252	252	321	321

(*): La SC500 dispone de versión con generador de vapor integrado y versión sin generador para ser conectado a una fuente de vapor externa.

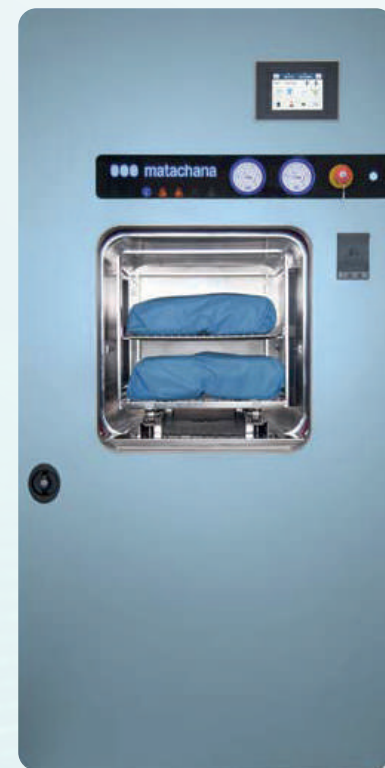

Matachana SC500

Esterilizadores de vapor S1000

Modelos	1004 E-1 1004 V-1	1004 E-2 1004 V-2	1006 E-1 1006 V-1	1006 E-2 1006 V-2	1008 E-1 1008 V-1	1008 E-2 1008 V-2	1010 E-1 1010 V-1	1010 E-2 1010 V-2	1012 E-1 1012 V-1	1012 E-2 1012 V-2
Especificaciones técnicas	1 puerta	2 puertas	1 puerta	2 puertas	1 puerta	2 puertas	1 puerta	2 puertas	1 puerta	2 puertas
Dimensiones totales (mm)										
Ancho	1710 **	1710 **	996	996	996	996	996	996	996	996
Alto	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954
Profundo	958	977	1314	1336	1614	1636	2054	2076	2313	2338
Dimensiones cámara (mm)										
Ancho	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Alto	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Profundo	625	638	998	996	1265	1296	1735	1733	2000	1998
Potencia (kW) *										
CON generador (E)	33	33	39	39	51	51	63	63	63	63
SIN generador (V)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Módulos de esterilización (M. E.)	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Volumen cámara (litros)	279	285	445	445	565	578	774	773	893	892

(*) La S1000 dispone de versión con generador de vapor integrado y versión sin generador para ser conectado a una fuente de vapor externa.

(**) Este valor incluye la zona técnica que se precisa para el mantenimiento.

Menú de navegación

Matachana ha desarrollado un entorno operativo intuitivo con una serie de iconos que permite que el usuario del esterilizador pueda, de una manera sencilla y rápida, moverse por los diferentes menús de selección de programas y configuración.

Adicionalmente el software ofrece una serie de útiles posibilidades como por ejemplo:

- Gestión de los resúmenes de proceso de la impresora
- Menú de selección de usuario
- Visualización valores sensores (temperatura y presión)
- Edición de contraseñas
- Ajustes de mantenimiento
- Mensajes de alarma, aviso y error



Independencia de lecturas

La unidad de control ofrece una supervisión de la esterilización gracias a la doble lectura de temperatura y presión de cámara mediante sensores independientes conectados a los dos PLC que dispone el equipo. Esta configuración asegura una gestión independiente de las lecturas, siendo un punto diferenciador respecto a otros fabricantes.

Programas

Los esterilizadores MATACHANA de la serie SC500 y S1000, disponen de varios programas preprogramados que cubren un amplio rango de combinaciones para satisfacer las necesidades de las centrales de esterilización más exigentes.

Existen dos tipos de programas:

- **Programas de test:** verificación del correcto funcionamiento del esterilizador
- **Programas de producción:** programas de esterilización o de producción de material estéril.



Matachana S1000

Programas estándar de los esterilizadores Matachana de la serie SC500 y S1000

Programas de producción	Aplicación
Estándar 134 °C	Para materiales embalados (instrumental sólido o con cavidades)
Estándar 121 °C	Para materiales termosensibles embalados
Contenedores 134 °C	Para materiales embalados (instrumental sólido o con cavidades o cargas pesadas en cestas o contenedores.
Rapid 134 °C	Para materiales sólidos con embalaje simple (una capa)
Especial P 134 °C	Para materiales susceptibles de estar contaminados con priones (*)
Programas de test	Aplicación
Test de vacío	Comprobar la hermeticidad de la cámara
Test de B&D	Comprobar la correcta eliminación del aire y la correcta penetración del vapor sobre la carga
Precalentamiento	Precalentar la cámara (al inicio de la jornada)

(*) No debe asumirse que los priones pueden ser inactivados tratándolos únicamente con este programa y será necesario realizar un pretratamiento adecuado previo la esterilización con este programa, siguiendo las recomendaciones de la OMS.

Miniclaves

Los Miniclaves (esterilizadores de sobremesa) MATACHANA incorporan en su diseño técnico avances en seguridad y eficacia, garantizándole un perfecto control de todos los procesos de esterilización.

Se fabrican siguiendo las directrices de las normas de calidad EN ISO 9001 y EN ISO 13485, garantizando que la empresa Antonio Matachana, S.A. lleva a cabo una gestión de la calidad en el diseño, producción, entrega, instalación y servicio posventa de sus productos.



Esterilizador de sobremesa 21E

Facilidad de uso

- Pantalla táctil de 3,5".
- Interface de usuario y estructura de menús orientados al usuario.

Programas de esterilización mejorados

- Capacidad para procesar 4 kg de carga.
- Ciclo S rápido para 4,0 kg en 27 minutos.

Esterilizador de sobremesa 21ED plus

Facilidad de uso

- Pantalla táctil de 3,5".
- Interface de usuario y estructura de menús orientados al usuario.
- Se dispone de dos versiones: versión básica y versión AWF.

Programas de esterilización mejorados

- Capacidad para procesar 6 kg de carga.
- Programa ECO B para 0,5 Kg en 30 minutos.

Esterilizador de sobremesa M20-B plus

Facilidad de uso

- Pantalla táctil de 4,3"
- Interface de usuario y estructura de menús orientados al usuario.
- Kit de llenado y vaciado automático de los depósitos.

Programas de esterilización mejorados

- Capacidad para procesar 6 kg de carga.
- Capacidad para procesar 2 kg en sólo 30 min.
- Programa S Rápido para 2 kg en 15 min.

Recomendados para uso en:



Centros de asistencia primaria



Clínicas de odontología



Clínicas de dermatología



Clínicas veterinarias



Clínicas de ginecología



Clínicas de podología

Matachana 130LF®

Esterilizadores de vapor a baja temperatura y formaldehído al 2%

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas	130LF® - 1 1 puerta	130LF® - 2 2 puertas
Dimensiones totales (mm)		
Anchura	900	900
Altura	1864	1864
Profundidad	1101	1118
Dimensiones de cámara (mm)		
Anchura	335	335
Altura	363	363
Profundidad	929	972
Volumen de cámara (litros)	143	148
Peso (kg)	550	600
Potencia (kW)	8	
Suministro eléctrico	*400 / V 3~ / N + PE / 50 Hz	

* Consultar otras opciones



Máxima velocidad

Programas y aplicaciones del esterilizador 130LF®

El esterilizador a baja temperatura 130LF® dispone de dos ciclos diferenciados para cubrir todas las necesidades en baja temperatura y más.



PROGRAMAS ESTERILIZACIÓN	60°C	¹ 89 - 110 min	² Endoscopios rígidos y flexibles multicanal, instrumentos complejos (canulados), ópticas y cámaras.	12 kg
	78°C	¹ 58 - 90 min	² Endoscopios rígidos, instrumentos complejos (canulados), ópticas y cámaras.	12 kg
PROGRAMAS TEST	VT		Test de vacío para confirmar la hermeticidad de la cámara del esterilizador.	

¹Tiempos en minutos, dependiendo de la carga, así como de los suministros y de la temperatura del agua

²Puedan resistir la esterilización por vapor con formaldehído hasta 60 °C o 78 °C

Máxima penetrabilidad

En comparación con la tecnología de esterilización a baja temperatura por peróxido de hidrógeno, VBTF ofrece una penetrabilidad muy superior.



Duodenoscopia PENTAX ED34-i10T2

	Tecnología	Límites geométricos			Límites capacidad
		Ø int. mínimo (mm)	Longitud máxima (m)	N.º máximo canales	Cantidad dispositivos máxima
PLÁSTICO	VBTF	³ 0,5	³ 3	Sin límites	Sin límite en número. Solo límite en peso (kg)
	H ₂ O ₂	1	1	2	2
METAL	VBTF	0,5	0,5	Sin límites	Sin límite en número. Solo límite en peso (kg)
	H ₂ O ₂	1	0,125	1	7

³Pruebas realizadas con un extremo ciego, lo que aumenta el desafío

Bolsa de solución esterilizante




■ La bolsa de plástico que contiene la solución esterilizante de VBTF se denomina **e-bag®** y ha sido especialmente desarrollada para ser utilizada únicamente en los esterilizadores MATACHANA modelo 130LF®.



■ Las soluciones esterilizantes de VBTF tienen una concentración de sólo el 2 % de solución acuosa de formaldehído.

■ El **e-bag®** está fabricado en polietileno de alta resistencia al impacto (LDPE).

■ Con etiqueta **RFID** para garantizar la trazabilidad de la solución esterilizante de VBTF y un mayor control de la caducidad.

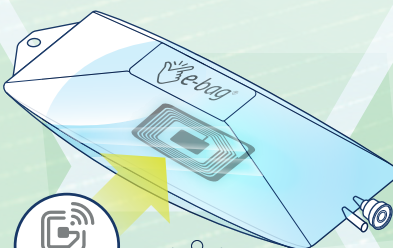

■ Fácil colocación y pinchado automático.

■ Indicador luminoso en compartimento **e-bag®** facilita la sustitución de la bolsa.

■ Información en pantalla de trazabilidad de la solución esterilizante de VBTF: lote de la botella y caducidad



■ ¡Caducidad de **36 meses**! Para una mayor flexibilidad en la gestión de stocks.

■ Se suministra en cajas de 3 **e-bag®** con un volumen de 2,7 litros cada una.



Matachana 130HPO® & 50HPO®

Esterilizadores a baja temperatura por peróxido de hidrógeno y plasma.

Dos modelos para cubrir las necesidades de centros de cualquier dimensión:



130HPO®: su cámara de 148 litros de capacidad, sus tres ciclos diferenciados y su velocidad lo convierten en la solución óptima para centros con gran volumen de trabajo.

50HPO®: su cámara de 52 litros, sus dimensiones contenidas y montaje en mesa móvil combinado con sus requisitos eléctricos mínimos lo convierten en la perfecta solución plug & play para centros más pequeños o como equipo de soporte para centros grandes.

Programas y aplicaciones de los esterilizadores HPO

La serie de esterilizadores a baja temperatura HPO dispone de tres ciclos diferenciados para cubrir todas las necesidades.

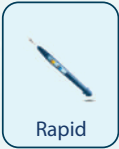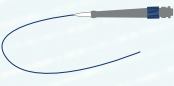

			130HPO®	50HPO®		
PROGRAMAS ESTERILIZACIÓN	 Rapid	Instrumentos no canulados con y sin articulación.	² 27 min	9.5 kg	6 kg	 Endoscopia flexible no canulada  Cámaras
	 Advanced	2 endoscopios flexibles (de 1 y 2 canales) e Instrumental no canulado.	² 38 min	10.5 kg	2.5 kg	 Ureteroscopios Cistoscopios
	 Standard	Hasta 20 endoscopios rígidos canulados e Instrumentos no canulados.	² 52 min	9.5 kg	6 kg	 Laringoscopios  Rasuradoras
PROGRAMAS TEST	 VT	Test de vacío para confirmar la hermeticidad de la cámara del esterilizador.				

¹ Todos los instrumentos indicados en el programa Rapid también son aptos para los programas Advanced y Standard, a excepción de las ópticas da Vinci®.

² Excluida fase Preparación entre 6 y 8 minutos.

³ Solo compatible con 130HPO®.

Un amplio abanico de ventajas para cubrir todas sus necesidades



Facilidad de uso

Interfaz de usuario intuitiva EasyRUN. Status del equipo visible a distancia gracias al frontal retroiluminado. Fácil y rápido aprendizaje por parte de los usuarios.



Conectividad y documentación

Impresora térmica integrada. Memoria interna de gran capacidad con historial de los últimos 1000 ciclos. Puerto USB que permite realizar copia de seguridad del historial de ciclos. Puerto ethernet para conexión a software de monitorización y trazabilidad.



Autonomía BluKat®

Hasta 30 ciclos con una botella en el modelo 50HPO®.
Hasta 18 ciclos con una botella en el modelo 130HPO®.




Caducidad de la solución

¡BluKat® tiene la caducidad más extensa del mercado alcanzando los 18 meses! Propiedades de la solución esterilizante garantizadas 30 días en el equipo gracias al exclusivo sistema de refrigeración integrado.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas	50HPO®	130HPO® 1 puerta	130HPO®-2 2 puertas
Dimensiones totales (mm)			
Anchura	780	900	900
Altura	1733	1864	1864
Profundidad	796	1099	1120
Dimensiones útiles de cámara (mm)			
Anchura	302	335	335
Altura	236	363	363
Profundidad	640	929	972
Volumen de cámara (litros)	52	143	148
Peso (kg)	*300	450	500
Potencia (kW)	2,2	6,5	
Suministro eléctrico **	230 V~ + PE /50-60 Hz		400 V 3~ N PE /50-60 Hz

* Incluye mesa de soporte
** A consultar otros voltajes

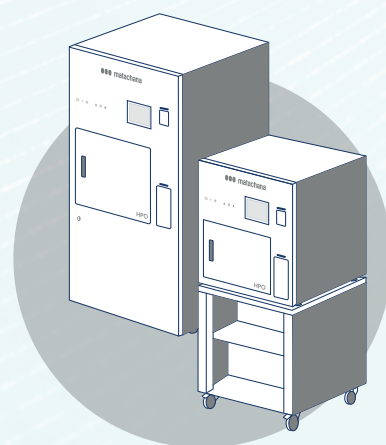

Topic 20

Modelo vertical para el montaje en el suelo (con o sin pila)

Máquina de limpieza y desinfección con pedestal. Basta con colocarla y conectarla. La solución ideal que permite emplear las conexiones existentes.



Dimensiones (en mm):
anch. 500, prof. 450 o 588, alt. 1.730



Protección e higiene, sin utilizar las manos

Manejo cómodo y máxima seguridad en la higiene para el personal sanitario y, a la vez, el mayor grado posible de protección para sus pacientes: esto es lo que garantiza el modelo de TopLine con puerta de apertura automática sin contacto, dotado de un sensor de infrarrojos y, si el cliente lo desea, con inicio automático del programa. La eficaz parada de seguridad también protege al personal sanitario para evitar que se pille los dedos.

De forma opcional, hay disponible un interruptor de pie como unidad de mando adicional.



Detector de proximidad para abrir y cerrar la puerta de la máquina (opcional).



Interruptor de pie para abrir y cerrar la puerta de la máquina (opcional).

Doyen SK10

Abrillantador ligeramente ácido dispone además de una función de ablandamiento del agua y garantiza la limpieza de los utensilios sanitarios.

La perfecta combinación de máquina y producto químico para una higiene en la que puede confiar.

EEE México

C E N T R A L

Guillermo Barroso No. 11-A Fracc.
Industrial Las Armas, Tlalnepantla,
C.P. 54080, Estado de México, México.

 + (52) 55 2626 5001

info@grupoeeee.com

EEE Guadalajara

 + (52) 33 8995 0181 /82/83

guadalajara@grupoeeee.com

EEE Colombia

 + (57) 1 841 5646

colombia@grupoeeee.com

EEE Puebla

 + (52) 22 2234 7737
+ (52) 22 2213 3528/29

ventas.puebla@grupoeeee.com

EEE Costa Rica

 + (50) 6 2237 7338

costarica@grupoeeee.com

EEE Monterrey


 + (52) 81 8336 0645
+ (52) 81 1939 3140

monterrey@grupoeeee.com

EEE Panamá

 + (50) 7 391 7870

panama@grupoeeee.com

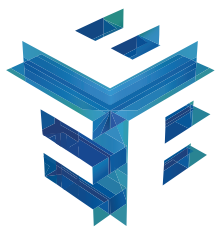

*Especialistas en
Esterilización y
Envase*

A MEMBER OF THE  **STERIMED GROUP**



Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



GrupoEEE



www.grupoeeee.com