

Guantes de Látex

no estériles para exploración



Rubbercare Protection Products Sdn Bhd
Formerly Known as Perusahaan Pellindung Getah (M) Sn Bhd



- **Desechables**
- **Ambidiestro**
- **Poco talco**
- **Fácil ajuste**



Recomendaciones

Para mayor vida en anaquel manténgase en un lugar fresco y seco, no se exponga al sol. Manténgase fuera del alcance de los niños.



REG. No. 1310C98SSA

Hechos con el Látex natural de la mejor calidad.


Instrucciones de uso y precauciones



- Los guantes de Látex pueden ser no adecuados para cierto tipo de personas que ya sea por mal uso o por poca tolerancia a la proteína del Látex.
- El Látex es causa de reacciones alérgicas, en algunos casos extremos puede causar ataques respiratorios y aún decesos.
- Absténgase de usar guantes de látex si tiene un historial de reacciones alérgicas al látex. Usar otra alternativa de no látex.
- Usuarios que por primera vez usen guantes de Látex, acudir al medico a la primer señal de alergia.
- Usuarios deben considerar no tocar áreas sensitivas o faciales después de usar los guantes para eliminar la irritación de la piel.
- Selecciones los guantes del tamaño adecuado, nunca muy ajustados. Unos guantes que se ajusten adecuadamente reducen la fatiga de los músculos al trabajar.
- Lávese las manos entre cada cambio de guantes para remover el talco de las manos.
- Mantenga las uñas cortas, las uñas largas obstruyen el uso efectivo de los guantes y pueden llegar a romperlos y eliminar su finalidad protectora.
- Los guantes de látex no están ventilados. Buscar cualquier oportunidad para permitir que su piel respire hasta que sea necesario usar un nuevo par de guantes.
- Los usuarios deben considerar remover el talco después de usar, el talco puede ser removido con una gasa estéril o toalla mojada.



Distribuido por :
Especialistas en Esterilización
y Envase S.A. de C.V.
Tel. + (52) (55) 2626 5001
Fax.+ (52) (55) 5394 8100
ventas@grupoeee.com

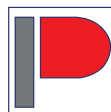

Hecho por:
Perusahaan Pelindung
Getah (M) Sdn. Bhd.



Presentaciones

Tamaño	Extra chico	Chico	Mediano	Grande
Clave	GDE001	GDE002	GDE003	GDE004
Contenido	Caja con 100 guantes	Caja con 100 guantes	Caja con 100 guantes	Caja con 100 guantes

